

samaritan® PAD 360P Trainer

Desfibrilador con control remoto para entrenamiento

Permite demostraciones realistas para entrenamiento

El samaritan PAD Trainer con control remoto es un desfibrilador de entrenamiento fácil de usar que guía a los usuarios a través de un análisis simulado, una descarga de energía y una Resucitación Cardiopulmonar (RCP) con indicaciones. Tiene el mismo aspecto y se siente igual que un verdadero desfibrilador de acceso público samaritan PAD 350P, pero no permite la carga y la descarga eléctrica real.



Simula el rango total de escenarios de la "vida real"

El control remoto multifunción permite seleccionar seis escenarios de AHA/ERC para demostraciones en vivo o entrenamiento. El control remoto puede operar varias unidades de entrenamiento al mismo tiempo (dentro de un rango de 3 a 5 metros/10 a 15 pies). El Trainer también es compatible con cualquier sistema de RCP con maniqués.

Realista

Las instrucciones auditivas y visuales y el asistente de RCP son iguales a los del desfibrilador samaritan PAD de HeartSine. El tamaño y la forma también son iguales. La etiqueta distintiva y el color de la membrana evitan su uso involuntario en una emergencia real.

Apropiado para cualquier nivel de destreza

El Trainer puede ser usado por compañías para entrenar a sus empleados de primeros auxilios en el uso del samaritan PAD de HeartSine. Además, satisface las necesidades de entrenadores profesionales, ya sea para capacitar a usuarios primerizos o refrescar el conocimiento de socorristas experimentados.

Rentable

El Trainer funciona con una batería recargable. Las almohadillas de electrodos son rentables y reutilizables, e imitan al exclusivo cartucho de batería/electrodos Pad-Pak™ del desfibrilador samaritan PAD de HeartSine.



Producto integral. El paquete del samaritan PAD Trainer de HeartSine incluye: control remoto con pilas AAA, Trainer-Pak, cargador de la batería, estuche blando de transporte con dos compartimientos con cierre relámpago, manual de usuario, cable de transferencia de datos y cinco pares de almohadillas de electrodos para entrenamiento.

Escenarios

El samaritan PAD Trainer de HeartSine ofrece escenarios de rescate realistas para entrenamiento en el uso de DEA y cumple con el protocolo 2010 de AHA/ERC de una descarga seguida por dos minutos de RCP. Un metrónomo y una señal intermitente a 110 latidos por minuto ayudan a establecer el ritmo adecuado para las compresiones torácicas.

Algunos de los escenarios de entrenamiento que se pueden elegir son:

- ▶ Condición en la que SE RECOMIENDA DESCARGA (SA), seguida de RCP
- ▶ Condición en la que NO SE RECOMIENDA DESCARGA (NSA), seguida de RCP
- ▶ CONTROL CON ALMOHADILLAS, seguido de una condición SA y RCP
- ▶ Comienzo con modo de "ANÁLISIS", seguido por SA y RCP, SA y RCP, y NSA y RCP
- ▶ Condición en la que SE RECOMIENDA DESCARGA (SA), seguida de RCP, 30 compresiones y 2 respiraciones boca a boca
- ▶ Condición en la que NO SE RECOMIENDA DESCARGA (NSA), seguida de RCP, 30 compresiones y 2 respiraciones boca a boca



Características y detalles del producto

Características

Mecanismo de rebobinado de cable. La fácil reposición de las almohadillas y los cables después de cada sesión reduce el tiempo invertido en reconfigurar el sistema.

Batería recargable. Funciona hasta siete horas, es decir, un día completo de entrenamiento, con una sola carga. Se recarga en sólo seis horas.

Indicador de estado de la batería. Cuenta con luces LED que indican el estado de carga de la batería (mientras no está en uso) o que queda una hora de batería restante (durante el uso).

Botón de pausa. Detiene temporalmente, y luego reanuda, el escenario de entrenamiento para permitir que el instructor ofrezca explicaciones adicionales y apoyo a la clase.

Configuración de volumen. Cuatro niveles de volumen disponibles con selección predeterminada del último nivel de volumen utilizado.

Múltiples escenarios de entrenamiento. Seis escenarios de AHA/ERC preprogramados.

Almohadillas de entrenamiento. Incluye cinco pares de almohadillas de electrodos reutilizables y reemplazables. Compatibles con todos los maniqués para entrenamiento, las nuevas almohadillas de electrodos son más fáciles de volver a colocar en su funda.

Actualizable. Las actualizaciones del software del Trainer están disponibles para su descarga en el sitio web de HeartSine.

Opciones de idioma. Veintinueve opciones de idioma permiten que el Trainer proporcione instrucciones en el idioma local.



Detalles del producto (TRN-360-xx)

Especificaciones

- ▶ Peso: 0,6 kg (1,3 lb)
- ▶ Batería: Recargable
- ▶ Incluye: Control remoto con pilas AAA, Trainer-Pak, cargador de batería, estuche blando de transporte con dos compartimientos con cierre relámpago, manual de usuario, cable de transferencia de datos y cinco pares de almohadillas de electrodos para entrenamiento

Accesorios de repuesto

- ▶ Repuesto del control remoto (TRN-ACC-18)
- ▶ Cable de datos (PAD-ACC-02)
- ▶ Cartucho de electrodos Pad-Pak (TRN-PAK-04)
- ▶ Cargador de batería (TRN-ACC-14)
- ▶ Electrodo: 10/pak (TRN-ACC-02), 25/pak (TRN-ACC-03)



Simple y sencillamente, salva vidas

Distribuidor autorizado

Estados Unidos/Américas

HeartSine Technologies, Inc.
121 Friends Lane, Suite 400
Newtown, PA 18940
Línea gratuita: (866) 478 7463
Teléfono: +1 215 860 8100
Fax: +1 215 860 8192
info@heartsine.com

Europa/resto del mundo

HeartSine Technologies, Inc.
203 Airport Road West
Belfast, Irlanda del Norte
BT3 9ED
Teléfono: +44 28 90 93 94 00
Fax: +44 28 90 93 94 01
info@heartsine.com



Los productos que se describen en este folleto cumplen los requisitos aplicables de las Directrices Europeas sobre Dispositivos Médicos.

© 2014 HeartSine Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados. H009-036-303-0



www.heartsine.com