


緊急使用指南

SAM 360P 只在有需要時才會傳送電擊。並且不會對病人造成任何傷害。

按下  啟動 SAM 360P，並依照語音提示採取行動。

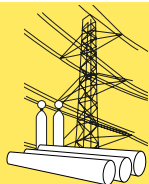

1. 避免危險

移除任何可能造成危險的源頭，或者將病人移到安全的地方。確保您的自身安全。



危險：使用 SAM 360P 時，必須與任何射頻裝置保持最少 2 米 (6 英尺) 距離。亦可以關掉會造成電磁干擾的設備。



2. 檢查病人有無反應

輕拍病人的肩膀。大聲向病人說話。



3. 檢查氣道

檢查病人有無呼吸。打開氣道，如有需要可抬起病人的下巴。


下頁續...



4. 請求救助

撥打緊急救助服務電話。
請求其他人施以援手。
去拿 SAM 360P。

毋須將 SAM 360P 從軟包袋中取出，即可使用。

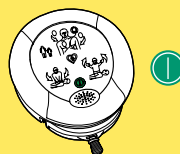

6. 啟動 SAM 360P

啟動 SAM 360P。

視乎裝入的 Pad-Pak™ 型號，SAM 360P 會發出語音提示：「成人病人」或「兒童病人」。如有需要，換上正確的 Pad-Pak 型號。




5. 施行心肺復蘇術

大力並快速地按壓病人胸部，速度最每分鐘少為 100 次，每次 5 至 6 厘米深。每按壓 30 次後，進行兩次人工呼吸。




警告：如果沒有 Pediatric-Pak™ 或者找不到其他適合的除顫器，可以使用成人 Pad-Pak 治療兒童病人。

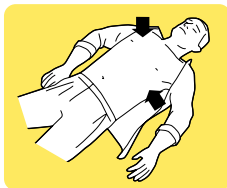

7. 脫掉胸膛衣物，露出皮膚

脫掉病人胸膛的衣物。拿掉胸膛的任何金屬物品（例如胸圍或首飾）。確保病人的胸膛乾爽。如果病人的胸毛濃密，剃除放置電擊板位置的胸毛。

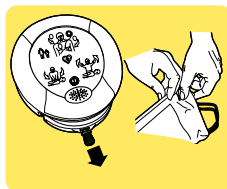


8. 打開電擊板小袋

拉開綠片以打開電擊板存放室，然後撕開電擊板小袋。



9. 放置電擊板

依照語音提示採取行動。撕去電擊板的襯背，如圖所示般放於病人胸膛上。

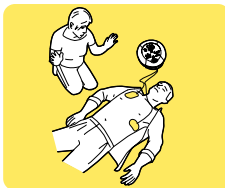

10. 切勿觸碰病人

確保 SAM 360P 進行分析或傳送電擊期間，任何人均不會觸碰病人。

SAM 360P 在有需要時會自動傳送電擊。

語音提示會告訴您要怎樣做。

下頁續...

11. 繼續救治

繼續依照語音提示採取行動。如有需要，SAM 360P 會告訴您繼續施行心肺復蘇術。

節拍器能協助您維持正確的心肺復蘇術節奏。SAM 360P 將會視乎情況所需繼續傳送電擊，傳送前會先向您發出警告。

如果病人蘇醒，毋須拆下電擊板，請繼續依照語音提示採取行動，直到緊急救助人員抵達為止。



欲了解更多資訊，請透過 heartsinesupport@stryker.com 與我們聯繫，或參見我們的網站 heartsine.com。

EMEA/APAC

HeartSine Technologies, Ltd.

203 Airport Road West

Belfast, BT3 9ED

United Kingdom

Tel: +44 28 9093 9400

Fax: +44 28 9093 9401



© 2019 HeartSine Technologies. 版權所有。

H037-019-432-0 HK