

Saver EVO[®]

Naudotojo vadovas

Turinys

„Saver EVO“ naudojimo instrukcijos	3
Atsisiųskite iš žiniatinklio svetainės	3
Trumposios instrukcijos	3
„Saver EVO“ naudojimas	4
„Saver EVO“ naudojimas su „HeartSine samaritan PAD“	5
Informacijos apie įvykius gavimas iš „HeartSine samaritan PAD“	6
Įvykių peržiūra naudojant „HeartSine samaritan PAD“	7
Atminties tyrimas naudojant „HeartSine samaritan PAD“	8
„HeartSine samaritan PAD“ nuostatų keitimas	8
„Saver EVO“ naudojimas su PDU*	11
Įvykio duomenų gavimas iš PDU atminties kortelės	12
Įvykių, įrašytų į PDU, peržiūra	13
PDU nuostatų peržiūra	14
„Saver EVO“ naudojimas su įrašytais įvykiais	15
Eksportavimas ir importavimas	15
Įvykių eksportavimas	15
Įvykių importavimas	16
Įrašytų įvykių šalinimas	16
„Saver EVO“ nuostatų keitimas	17
Slaptažodžio keitimas	17
„Saver EVO“ kalbos keitimas	18
Patikra, ar yra automatinių naujinimų	19
Kibernetinė sauga	19

Šiame dokumente esanti informacija gali būti pakeista neperspėjus ir nereiškia „HeartSine Technologies Ltd.“ įsipareigojimo. Jokia šio vadovo dalis negali būti jokia forma ir jokiais būdais (elektroniniais ar mechaniniais) kopijuojama arba perduodama, įskaitant fotokopijavimą ir įrašymą koku nors tikslu, be rašytinio „HeartSine Technologies Ltd.“ leidimo.

heartsine.com

heartsinesupport@stryker.com

„Saver EVO“ naudojimo instrukcijos

„Saver EVO“ programinė įranga leidžia gauti defibriliavimo įvykių duomenis iš „HeartSine® samaritan® PAD“ ir PDU atminties kortelės. Be to, „Saver EVO“ leidžia tvarkyti į AK įrašytus įvykių duomenis, t. y. spausdinti, importuoti ir eksportuoti įvykių duomenis kitiems „Saver“ ir „Saver EVO“ naudotojams.

„Saver EVO“ pateikiama su programinės įrangos licencija, kuri leidžia įdiegti ir naudoti programinę įrangą viename AK, kuriame įdiegta „Microsoft Windows“ (pageidautina „Windows 10“).

Atsisiųskite iš žiniatinklio svetainės

Norint įdiegti „Saver EVO“ gali reikėti administravimo leidimo – jei būtina, kreipkitės į savo sistemos administratorių / IT paslaugų teikėją.

1. Atsidarykite HeartSine.com ir atsisiųskite „Saver EVO“ programinę įrangą savo regionui.
2. Atsisiuntę paleiskite „ SaverEVO_setup.exe“, kad būtų įdiegta „Saver EVO“. (Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.)
3. Perskaitykite naudotojo licencijos sutartį. Norint įdiegti šią programinę įrangą reikia patvirtinti sutarties sąlygas. Kad patvirtintumėte sąlygas, spustelėkite mygtuką „Next“ (toliau).
4. Standartinės konfigūracijos „Saver EVO“ bus įdiegta į numatytąją vietą. Norėdami patvirtinti, spustelėkite mygtuką „I agree“ (sutinku). Šių numatytųjų nuostatų nereikėtų keisti, nebent esate patyręs kompiuterio naudotojas.
5. Jeigu klausiama dėl prietaiso tvarkyklės sertifikavimo, spustelėkite mygtuką „Continue anyway“ (vis tiek tęsti).

Trumposios instrukcijos

Kaip gauti įrašytus defibriliavimo įvykių duomenis iš „HeartSine samaritan PAD“ arba PDU atminties kortelės.

1. Prijunkite atitinkamą prietaisą prie AK.
2. Atverkite „Saver EVO“ programinę įrangą.

3. Spustelėkite mygtuką  arba mygtuką .

4. Spustelėkite mygtuką , kad būtų atvertas įrašytų įvykių sąrašas.

5. Sąraše išryškinkite reikiamus įrašytus įvykius.

6. Spustelėkite mygtuką , jei norite peržiūrėti įvykius.

7. Spustelėkite mygtuką  ir įveskite reikiamą informaciją apie pacientą, kad įrašytumėte įvykį į AK.

8. Jeigu reikia, spustelėkite  įvykio įrašui išspausdinti.

„Saver EVO“ naudojimas

Toliau parodytas „Saver EVO“ pradžios langas



„Saver EVO“ pradžios ekranas



samaritan PAD – atveriamas „HeartSine samaritan PAD“ būdingų funkcijų meniu. Išsamesnės informacijos žr. p. 5.



samaritan PDU – atveriamas PDU būdingų funkcijų meniu. Išsamesnės informacijos žr. p. 12.



Manage Saved Events (tvarkyti įrašytus įvykius) – atveriamas į AK įrašytiems įvykiams būdingų funkcijų meniu. Išsamesnės informacijos žr. p. 16.



Exit Saver EVO (uždaryti „Saver EVO“) – išjungiama „Saver EVO“ programinė įranga.



Change Saver EVO password (pakeisti „Saver EVO“ slaptažodį) – pakeiskite „Saver EVO“ slaptažodį ir pasirinkite kalbos parinktį. Be to, naudotojas gali matyti informaciją apie „Saver EVO“ peržiūras.

Konkrečių meniu naudojimas išsamiau aptariamas tolesniuose skirsniuose.

„Saver EVO“ naudojimas su „HeartSine samaritan PAD“

Norint naudoti „Saver EVO“ su „HeartSine samaritan PAD“ reikia USB duomenų kabelio (kuris gali būti pateikiamas su „HeartSine samaritan PAD“). Jei neturite kabelio, kreipkitės į „Stryker“ pardavimo atstovą arba įgaliojotą platintoją. Jei „HeartSine Gateway“ prijungiama prie jūsų AED, galite naudoti mažosios USB jungties kabelį.

1. USB duomenų kabeliu prijunkite „HeartSine samaritan PAD“ prie savo AK USB prievado. Atidarykite „Saver EVO“ programinę įrangą.
2. Spustelėjus „samaritan PAD“ mygtuką atveriamas toliau parodytas langas.



„Saver EVO“ PAD prieigos ekranas



PAD Data (PAD duomenys) – spustelėkite šį mygtuką norėdami nuskaityti įvykio duomenis iš „HeartSine samaritan PAD“. Išsamesnės informacijos žr. p. 6.




Change PAD Settings (pakeisti PAD nuostatas) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite leisti diagnostinius testus arba pakeisti „HeartSine samaritan PAD“ konfigūraciją (garsumą ir laiką). Išsamesnės informacijos žr. p. 8.



Back (atgal) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite grįžti į „Saver EVO“ pradžios ekraną.

Informacijos apie įvykius gavimas iš „HeartSine samaritan PAD“

Jei norite gauti defibriliavimo įvykių duomenis iš „HeartSine samaritan PAD“, pasirinkite, kad „HeartSine samaritan PAD“ būtų prijungta prie AK, tada spustelėkite mygtuką „PAD Data“ (PAD duomenys). Tada bus ieškoma „HeartSine samaritan PAD“ atmintyje ir pateikiami visi įrašyti įvykiai, kaip parodyta toliau.

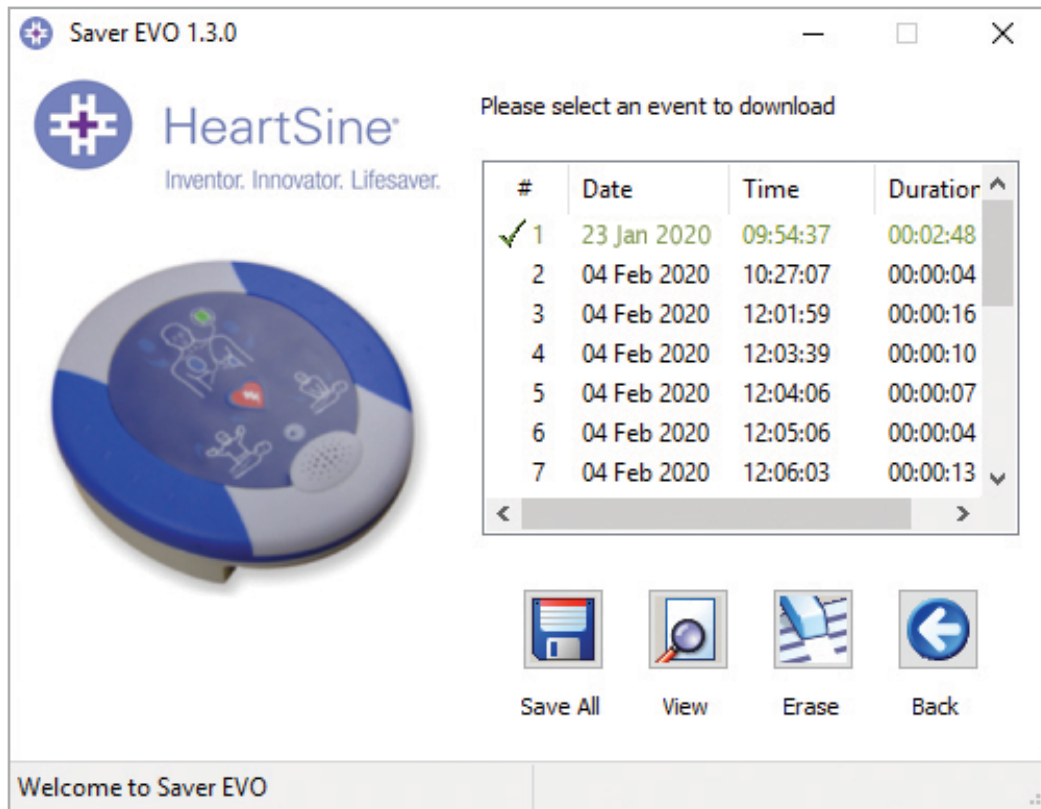

„Saver EVO“ PAD įvykių žurnalo sąrašo langas

Įvykiai, parodyti žaliu tekstu ir ✓ simboliu, jau buvo įrašyti į AK.



Save All (įrašyti visus) – spustelėjus mygtuką „Save All“ (įrašyti visus) visi PAD įvykių žurnale išvardyti įvykiai įrašomi į AK viename faile.

PASTABA: Šiuo būdu įrašytų įvykių negalima peržiūrėti naudojant šią „Saver EVO“ versiją. Jei norite gauti įvykių iš failo, kreipkitės į „HeartSine Technologies“ klientų aptarnavimo skyrį. Jei norite atskirai įrašyti įvykius, kad galėtumėte vėliau peržiūrėti, žr. funkciją „Save“ (įrašyti) skirsnyje **„HeartSine samaritan PAD“ įvykių peržiūra** 7 psl.



View (peržiūrėti) – spustelėjus šį mygtuką rodomas pasirinktas įvykis.




Erase (trinti) – spustelėjus šį mygtuką, iš „HeartSine samaritan PAD“ pašalinami visi įvykiai. Išsamesnių patarimų, kaip pašalinti duomenis, žr. p. 8.



Back (atgal) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite grįžti į „Saver EVO“ PAD prieigos ekraną.

Įvykių peržiūra naudojant „HeartSine samaritan PAD“

1. Jei norite peržiūrėti įvykį, pažymėkite jį sąraše, tada spustelėkite mygtuką „View“ (peržiūrėti). Vienaame peržiūros lange bus atvertas defibriliavimo įvykis su EKG kreive ir įvykių žurnalu.

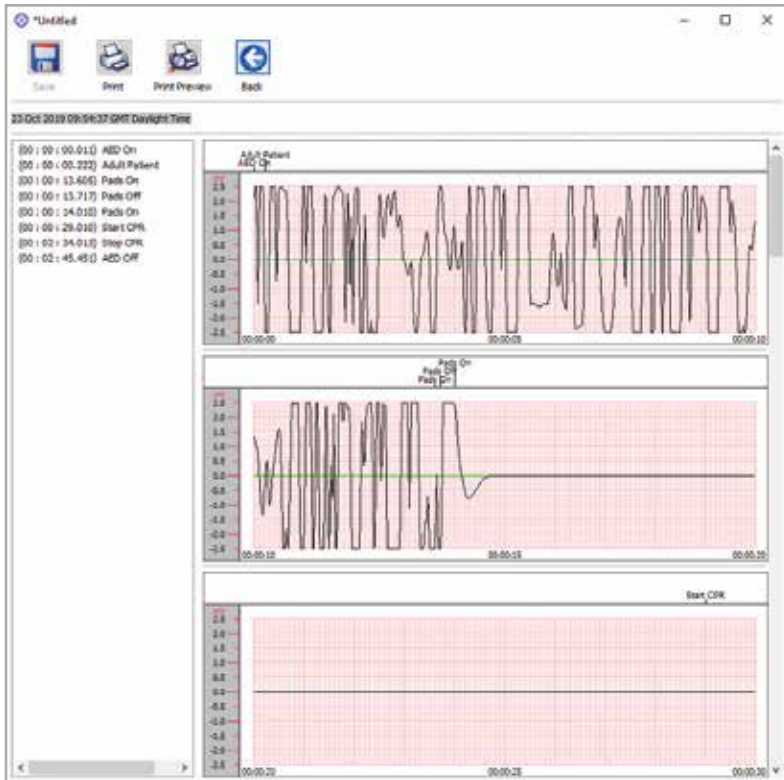

„Saver EVO“ PAD įvykių peržiūros langas

2. Dabar, spustelėję mygtuką „Save“ (įrašyti), galite rinktis įrašyti rodomą įvykį į AK. Šitaip įrašytus įvykius galima peržiūrėti „Saver EVO“. Yra parinkčių įvesti informacijai, kad būtų galima identifikuoti pacientą į AK įrašytų įvykių sąraše. Informacija apie pacientą gali būti skaičiai arba raidės, ir kiekvieną laukelį galima užpildyti arba palikti tuščią.

The screenshot shows the 'Enter Patient Details' dialog box. At the top, the subject ID 'Subject0002' is displayed. Below it, there is a dropdown menu for 'Record Type' set to 'Subject'. There are five text input fields: 'Surname', 'Forename', 'D.O.B.', 'Patient ID', and 'Event Date and Time'. The 'Event Date and Time' field is pre-filled with '04 Feb 2020 10:27:07 GMT Standard Time'. At the bottom, there are three buttons: 'New Record Type', 'Save', and 'Cancel'.

„Saver EVO“ PAD informacijos apie pacientą langas

PASTABA: Įrašius duomenis apie defibriliavimo įvykį į AK, tos informacijos nebegalima pakeisti.

Be to, „Saver EVO“ įvykių peržiūros lange yra tokie mygtukai:



Print (spausdinti) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite išspausdinti esamą metu peržiūros lange rodomą įvykį.



Print Preview (spaudinio peržiūra) – spustelėkite šį mygtuką norėdami ekrane peržiūrėti spaudinio duomenis.



Back (atgal) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite grįžti į „Saver EVO“ PAD įvykių žurnalo sąrašo langą.

Atminties trynimas naudojant „HeartSine samaritan PAD“

1. Kad ištrintumėte „HeartSine samaritan PAD“ atmintį, spustelėkite mygtuką „Erase“ (trinti).
2. Prieš ištrinant atmintį, „Saver EVO“ paragins įvesti slaptažodį kaip atsargumo priemonę. Įvedus tinkamą slaptažodį bus ištrinta „HeartSine samaritan PAD“ atmintis. Informacijos, kaip pakeisti numatytąjį slaptažodį, žr. skirsnyje **„Saver EVO“ slaptažodžio keitimas** 17 psl.

Rekomenduojama įvykių duomenis, gautus iš „HeartSine samaritan PAD“ ir įrašytus į AK, ištrinti iš „HeartSine samaritan PAD“ atminties. Taip bus užtikrinta, kad kito defibriliavimo įvykio duomenims įrašyti bus laisva visa atmintinė.

DĖMESIO: „HeartSine“ rekomenduoja prieš ištrinant atsisiųsti visą „HeartSine samaritan PAD“ atmintį. Šią informaciją reikėtų saugiai laikyti, nes gali jos prireikti ateityje.

„HeartSine samaritan PAD“ nuostatų keitimas

Mygtukas „Change PAD Settings“ (keisti PAD nuostatas) leidžia naudotojams sukonfigūruoti kai kurias „HeartSine samaritan PAD“ funkcijas:

- Patikrinti / nustatyti laiką
- Leisti diagnostinius testus

Be to, atitinkamas teises turintys naudotojai gali keisti tokias nuostatas:

- Garsumas
- Metronomo garso įjungimas / išjungimas

1. Spustelėjus mygtuką „Change PAD Settings“ (keisti PAD nuostatas) atveriamas toks ekranas (žr. kitą puslapį):



„Saver EVO“ PAD nuostatų keitimo langas

2.  **Check/Set PAD time** (patikrinti / nustatyti PAD laiką) – šis mygtukas leidžia naudotojams sinchronizuoti „HeartSine samaritan PAD“ laiką su AK laiku.



„Saver EVO“ PAD laiko tikrinimo / nustatymo langas

3. Spustelėjus mygtuką „Synchronize“ (sinchronizuoti), „HeartSine samaritan PAD“ nustatomas AK, prie kurio jis prijungtas, laikas.
4. Spustelėkite mygtuką „Close“ (užverti), kad grįžtumėte į „Saver EVO“ PAD nuostatų keitimo langą.



Run Diagnostic Tests (leisti diagnostinius testus) – šis mygtukas leidžia naudotojui paleisti kai kuriuos pagrindinius testus, kad patikrintų savo „HeartSine samaritan PAD“ veikimą. Galimų diagnostinių testų sąrašas atveriamas iš išskleidžiamojo meniu, kaip aprašyta toliau.




„Saver EVO“ PAD diagnostinių testų langas

„Saver EVO“ atpažins prijungto PAD prietaiso tipą ir rodys atitinkamus paveikslėlius, kad padėtų naudotojui atlikti testus.



Edit PAD Configuration (redaguoti PAD konfigūraciją) – spustelėkite šį mygtuką norėdami atidaryti PAD konfigūracijos redagavimo langą (parodytas toliau), kuriame galite peržiūrėti ir pakeisti tūrio bei metronomo nuostatas ir pamatyti prijungto „HeartSine samaritan PAD“ įrenginio programinės įrangos versiją. Norėdami patvirtinti šiuos pakeitimus turėsite įvesti „Saver EVO“ slaptažodį. Informacijos, kaip pakeisti numatytąjį slaptažodį, žr. skirsnyje **„Saver EVO“ slaptažodžio keitimas** 17 psl.

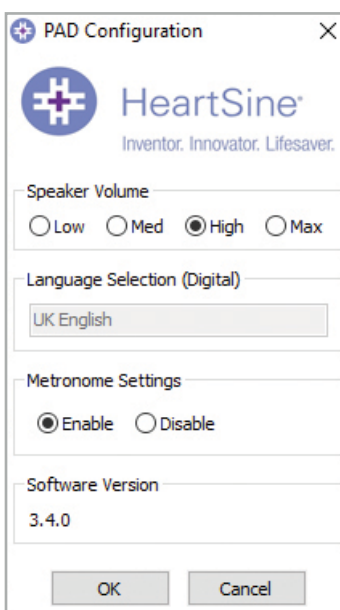

„Saver EVO“ PAD konfigūracijos redagavimo langas

„Saver EVO“ naudojimas su PDU*

1. Norint naudoti „Saver EVO“ su „samaritan PDU“ atminties kortele, reikia įdėti kortelę į MMC/SD suderinamą kortelių skaitytuvą, prijungtą prie kompiuterio (arba į jį įmontuotą), kuriame veikia „Saver EVO“. Atminkite, kad gali užtrukti kelias sekundes ar netgi daugiau nei minutę, kol kompiuterio operacinė sistema atpažins, kad kortelė yra kortelių skaitytuve.
2. Pradžios ekrane spustelėkite „samaritan PDU“ mygtuką. Bus atvertas toliau parodytas langas.



„Saver EVO“ PDU prieigos ekranas



PDU Data (PDU duomenys) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite gauti įvykių duomenis iš PDU atminties kortelės. Išsamesnės informacijos žr. p. 13.



PDU Settings (PDU nuostatos) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite peržiūrėti konfigūravimo nuostatas. Išsamesnės informacijos žr. p. 15.



Back (atgal) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite grįžti į „Saver EVO“ pradžios ekraną.

* „samaritan PDU“ nepasiekiamo JAV ir nėra „HeartSine“ siūlomas gaminy.

Įvykio duomenų gavimas iš PDU atminties kortelės

Pasirūpinkite, kad „samaritan PDU“ atminties kortelė būtų įdėta į SD/MMC kortelių skaitytuvą ir spustelėkite mygtuką „PDU Data“ (PDU duomenys). Bus išvardyti įvykiai, kurie yra įrašyti į atminties kortelę.



„Saver EVO“ PDU įvykių žurnalo sąrašo ekranas

Įvykiai su laikrodžio ženklu  yra sėkmingai atlikti PDU savitikros testai.

Įvykiai, parodyti žaliu tekstu ir  simboliu, jau buvo įrašyti į AK.



Save All (įrašyti visus) – šis mygtukas PDU režimu yra išjungtas.



View (peržiūrėti) – spustelėjus šį mygtuką rodomas pasirinktas įvykis. Išsamesnės informacijos žr. p. 13.



Erase (trinti) – šis mygtukas PDU režimu yra išjungtas.



Back (atgal) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite grįžti į „Saver EVO“ PDU prieigos ekraną.

Įvykių įrašytų į PDU, peržiūra

1. Jei norite peržiūrėti įvykį, pažymėkite jį sąraše, tada spustelėkite mygtuką „View“ (peržiūrėti). Viena peržiūros lange bus atvertas defibriliavimo įvykis su EKG kreive ir įvykių žurnalu:



„Saver EVO“ PDU įvykių peržiūros langas

2. Dabar, spustelėjęs mygtuką „Save“ (įrašyti), naudotojas gali rinktis įrašyti rodomą įvykį į AK. Tai suteikia galimybių įvesti informaciją, kad būtų galima identifikuoti pacientą. Informacija apie pacientą gali būti skaičiai arba raidės, ir kiekvieną laukelį galima užpildyti arba palikti tuščią.

„Saver EVO“ PDU informacijos apie pacientą langas

PASTABA: Įrašius duomenis apie defibriliavimo įvykį į AK, tos informacijos nebegalima pakeisti.

Be to, „Saver EVO“ įvykių peržiūros lange yra tokie mygtukai:



Print (spausdinti) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite išspausdinti esamą metu peržiūros lange rodomą įvykį.




Print Preview (spaudinio peržiūra) – spustelėjus šį mygtuką ekrane rodomas spausdinamų duomenų peržiūros langas.



Back (atgal) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite grįžti į „Saver EVO“ PDU įvykių žurnalo sąrašo ekraną.

PDU nuostatų peržiūra

Spustelėjus mygtuką „View Settings“ (peržiūrėti nuostatas) atveriamas toliau parodytas PDU konfigūravimo ekranas. Šiame lange naudotojas gali peržiūrėti akumulatoriaus galios, garsiakalbio garsumo, kalbos ir metronomo nuostatas, gaivinimo dažnį bei trukmę, taip pat PDU prietaiso galiojimo datą, programinės įrangos versiją ir serijos numerį. Naudotojas gali šias nuostatas tik peržiūrėti, o ne jas keisti.

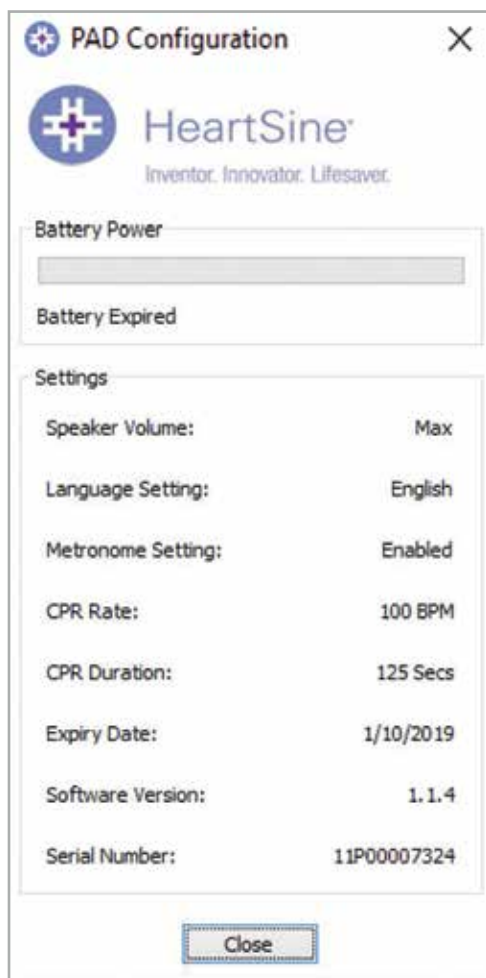


„Saver EVO“ PDU nuostatų peržiūros langas

„Saver EVO“ naudojimas su įrašytais įvykiais

Mygtukas „Manage Saved Events“ (tvarkyti įrašytus įvykius) „Saver EVO“ pagrindiniame ekrane leidžia naudotojams peržiūrėti iš „HeartSine samaritan PAD“, „samaritan Data-Pak“ akumuliatoriaus arba PDU atminties kortelės atsisiųstus duomenis ir juos įrašyti į kompiuterį.

1. Spustelėjus šį mygtuką bus atvertas toks langas:

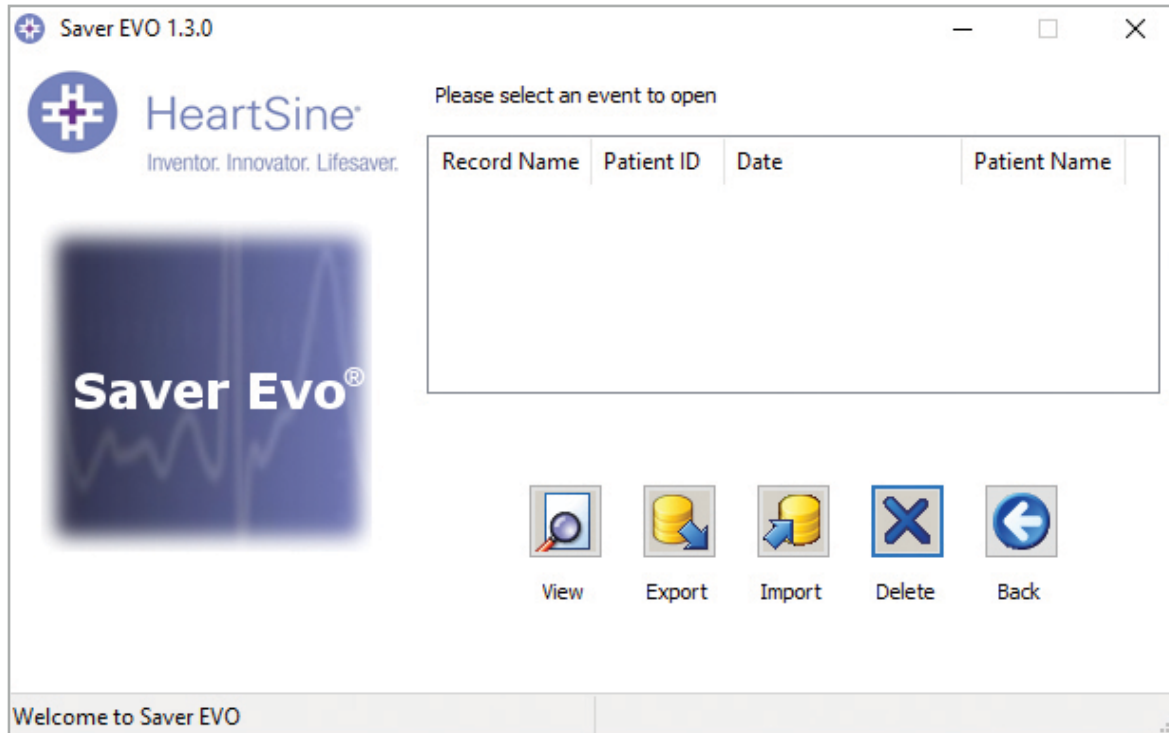

2. Pažymėjus įvykį sąraše ir spustelėjus mygtuką „View“ (peržiūrėti) atveriamas įrašytas įvykis, kad būtų galima peržiūrėti EKG duomenis ir įvykių žurnalą.

Eksportavimas ir importavimas

„Saver EVO“ turi funkcijų, leidžiančių naudotojams siųsti arba gauti defibriliavimo įvykio duomenis kitam žmogui, turinčiam „Saver EVO“ programinę įrangą. Įrašytų įvykių kopijoms siųsti arba gauti naudojamos „Saver EVO“ eksportavimo ir importavimo funkcijos.

Norėdami eksportuoti įvykius:

1. Įrašytų įvykių tvarkymo ekrane pažymėkite vieną arba kelis įvykius, kuriuos norite eksportuoti, ir spustelėkite mygtuką „Export“ (eksportuoti).
2. AK paklaus, į kurią vietą kompiuteryje norite įrašyti eksportuojamą failą, ir leis pasirinkti eksportuojamo failo pavadinimą.
3. Failui į pasirinktą vietą įrašyti spustelėkite mygtuką „Save“ (įrašyti).

Tada, naudojantis įprastine el. pašto programa, eksportuotą failą galima pridėti prie el. laiško ir jį išsiųsti kitam „Saver EVO“ programinės įrangos naudotojui.

Įvykių duomenis iš „Saver EVO“ gali peržiūrėti tik kitas „Saver EVO“ naudotojas. Senesnė „Saver“ programinė įranga negalės sėkmingai importuoti ir rodyti duomenų iš „Saver EVO“.

Norėdami importuoti įvykius:

Norint importuoti įvykius ir juos peržiūrėti savo AK, failą, kuris buvo atsiųstas iš kito „Saver“ arba „Saver EVO“ naudotojo, reikia įrašyti į AK.

1. „Saver EVO“ įrašytų įvykių tvarkymo ekrane spustelėkite mygtuką „Import“ (importuoti).
2. Naršykite vietą, kur buvo įrašytas failas, ir jį atverkite.
3. Įrašai bus pridėti į „Saver EVO“ failų kompiuteryje sąrašą.

Tada juos galima peržiūrėti išryškinant įvykį sąrašė ir spustelint mygtuką „View“ (peržiūrėti).

„Saver EVO“ tinkamai importuos ir rodys įvykio duomenis, eksportuotus iš senesnės programinės įrangos versijos, vadinamos „Saver“.

Įrašytų įvykių šalinimas

Įrašytus įvykius iš kompiuterio atmintinės gali ištrinti „Saver EVO“. Įvykiai trinami individualiai, pasirenkant įvykį(-ius), kuriuos reikia ištrinti (galima pasirinkti kelis įvykius) išryškinant.

Kai pasirenkate visus norimus ištrinti įvykius, spustelėkite mygtuką „Erase“ (trinti). Prieš ištrinant atmintį, „Saver EVO“ paragins įvesti slaptažodį kaip atsargumo priemonę. Įvedus tinkamą slaptažodį pasirinkti įvykiai ištrinami iš jūsų kompiuterio.

Dėmesio: Prieš ištrindami patikrinkite, ar tikrai buvo pasirinkti tik norimi ištrinti įvykiai. Iš kompiuterio atmintinės ištrintų įvykių atkurti nebegalima, ir prarandama visa informacija.


„Saver EVO“ nuostatų keitimas

„Saver EVO“ turi tam tikrų funkcijų, kurias galima keisti arba vykdyti tik įvedus slaptažodį. Tai leidžia programinės įrangos administratoriams riboti neįgaliojų naudotojų prieigą prie tam tikrų funkcijų. Diegiant „Saver EVO“ numatytasis slaptažodis yra „password“ (slaptažodis).

Norėdami pakeisti slaptažodį:



1. Pagrindiniame „Saver EVO“ ekrane spustelėkite mažą mygtuką „Settings“ (nuostatos). Bus atvertas toks langas:

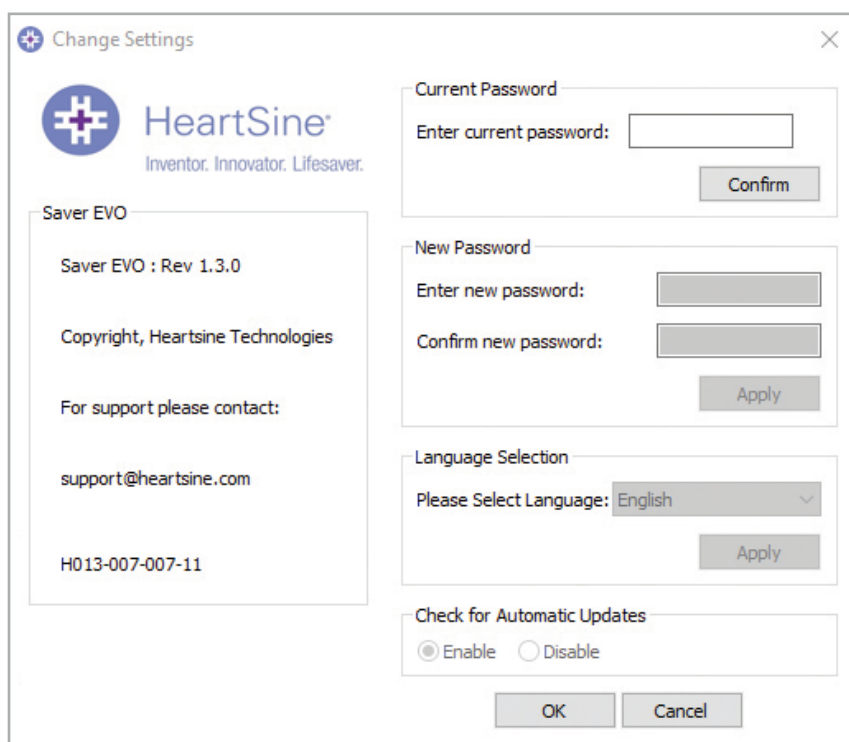


Nuostatų keitimo ekranas

- Įveskite dabartinį slaptažodį ir spustelėkite „Confirm“ (patvirtinti).
- Du kartus įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite „Apply“ (taikyti) norėdami atlikti pakeitimą.
- Spustelėkite OK (gerai) norėdami uždaryti slaptažodžio keitimo langą.

PASTABA: Pakartotinai diegiant „Saver EVO“ atstatomas numatytasis programinės įrangos slaptažodis. Tačiau šis veiksmas nepašalins jokių įvykių duomenų, kurie buvo pirmiau įrašyti.

Norėdami pakeisti „Saver EVO“ kalbą

- Jei norite pasirinkti „Saver EVO“ kalbą, pasirinkite kalbą išskleidžiamame sąraše ir spustelėkite „Apply“ (taikyti).

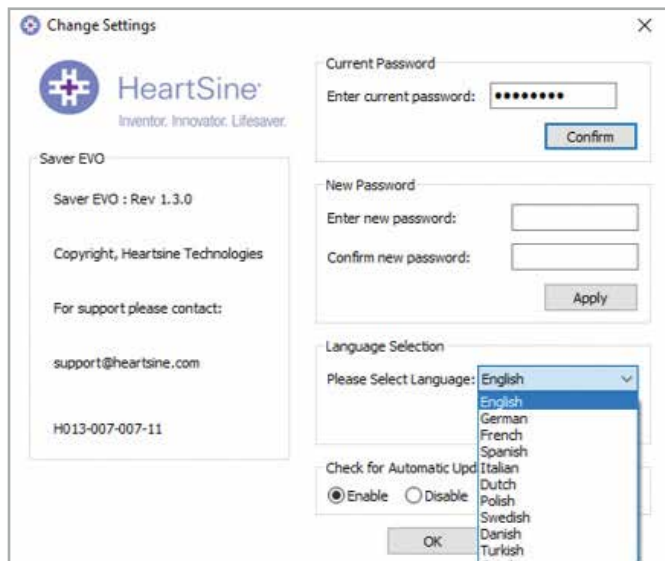


- Spustelėjus „Apply“ (taikyti) atveriamas toliau nurodytas ekranas ir „Saver EVO“ reikės paleisti iš naujo, kad būtų pritaikyta pasirinkta kalba.



- Spustelėkite „Yes“ (taip) arba „No“ (ne) norėdami uždaryti „Saver EVO“.

Norėdami patikrinti, ar yra automatinių naujinimų:

1. Jeigu pasirinktas žymimasis langelis „Enable“ (aktyvinti), kaskart paleidus „Saver EVO“ bandoma jungtis prie „HeartSine“ internetinės svetainės ir tikrinti, ar nėra naujesnės „Saver EVO“ versijos. Jeigu yra naujiny, paleidžiant „Saver EVO“ apie tai pranešama.

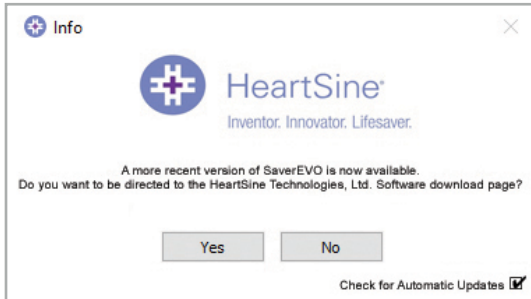

2. Jeigu norite atsisiųsti naujesnę „Saver EVO“ versiją, rinkitės „Yes“ (taip), jei ne – rinkitės „No“ (ne).

Kibernetinė sauga

- Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje pritaikytos visos „Microsoft“ saugos pataisos.
- Reguliariai kurkite kompiuterio duomenų atsargines kopijas (įskaitant „Saver EVO“ failus).
- Rekomenduojama kompiuteryje įdiegti antivirusinę / apsaugos nuo kenkėjiškų programų įrangą ir nuolat ją naudoti bei naujinti.
- Norėdami prisijungti prie kompiuterio naudokite patikimą slaptažodį. Slaptažodyje turi būti didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaitmenų bei simbolių.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis adresu **heartsinesupport@stryker.com** arba apsilankykite mūsų svetainėje adresu **heartsine.com**



HeartSine Technologies, Ltd.
203 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
Jungtinė Karalystė
Tel +44 28 9093 9400
Faks. +44 28 9093 9401

**JAV / Lotynų Amerikos klientų
aptarnavimas**

11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Nemokamas numeris 866 478 7463
Tel +1 215 860 8100
Faksas +1 215 860 8192

Pagaminta JK
© 2020 HeartSine Technologies.
Visos teisės saugomos.
H013-001-315-1 LT