

Saver EVO™

lietotāja rokasgrāmata

Informācija šajā dokumentā var tikt mainīta bez brīdinājuma un neuzliek *HeartSine Technologies LLC* nekādus pienākumus. Nevienu šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst pavairot vai pārsūtīt nekādā veidā un nekādiem līdzekļiem (elektroniskiem vai mehāniskiem), ieskaitot kopēšanu un ierakstīšanu jebkādiem nolūkiem bez skaidras *HeartSine Technologies Ltd.* rakstiskas atļaujas.

Tīmekļa vietne: www.heartsine.com • E-pasts: heartsinesupport@stryker.com

Satura rādītājs

Norādījumi Saver EVO lietotājiem	3
Lejupielādēt no tīmekļa vietnes	3
ĀTRIE NORĀDĪJUMI	3
Saver EVO lietošana	4
Saver EVO lietošana kopā ar HeartSine samaritan PAD	5
Notikumu datu izgūšana no HeartSine samaritan PAD	6
Notikumu skatīšana ierīcē HeartSine samaritan PAD	7
HeartSine samaritan PAD atmiņas dzēšana	8
HeartSine samaritan PAD iestatījumu maiņa	8
Saver EVO lietošana kopā ar PDU*	12
Notikumu datu izgūšana no PDU atmiņas kartes	13
PDU saglabāto notikumu skatīšana	14
PDU iestatījumu skatīšana	15
Saver EVO ar saglabātiem notikumiem lietošana	16
Eksportēšana un importēšana	16
Notikumu eksportēšana	16
Notikumu importēšana	17
Saglabāto notikumu dzēšana	17
Paroles un valodas maiņa programmatūrā Saver EVO	18
Valodas atlase	19
Pārbaudīt automātiskos atjauninājumus	19

Norādījumi Saver EVO lietotājiem

Programmatūra Saver EVO™ ļauj izgūt datus par defibrilācijas notikumu no jūsu HeartSine® samaritan® PAD un PDU atmiņas kartes. Saver EVO ļaus jums arī pārvaldīt notikumu datus, kas ir saglabāti datorā, ciktāl tas attiecas uz drukāšanu, importēšanu un eksportēšanu citiem Saver un Saver EVO lietotājiem.

Saver EVO tiek nodrošināta ar programmatūras licenci, kas ļauj instalēt un lietot programmatūru vienā datorā.

Lejupielādēt no tīmekļa vietnes

1. Dodieties uz <http://heartsine.com/support/system-updates/> un noklikšķiniet uz Download saites sadaļā Saver EVO Software.
2. Pēc lejupielādes palaidiet  SaverEVO_setup.exe, lai instalētu Saver EVO. (Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.)
3. Izlasiet lietotāja licences līgumu. Lai uzstādītu šo programmatūru, jums jāpieņem šī līguma nosacījumi. Lai pieņemtu nosacījumus, nospiediet pogu "Tālāk" (Next).
4. Saver EVO tiks instalēta noklusējuma atrašanās vietā un standarta konfigurācijā. Noklikšķiniet uz pogas "Piekrītu" (I agree), lai pieņemtu nosacījumus. Šos noklusējuma iestatījumus nevajadzētu mainīt, ja neesat pieredzējis datorlietotājs.
5. Ja jums jautā par ierīces draiveru sertifikāciju, noklikšķiniet uz pogas "Tomēr turpināt" (Continue anyway).

Ātrie Norādījumi

Lai izgūtu ierakstītos defibrilācijas notikumu datus no HeartSine samaritan PAD vai PDU atmiņas kartes, rīkojieties šādi:

1. Pievienojiet attiecīgo ierīci datoram.
2. Atveriet programmatūru Saver EVO.
3. Noklikšķiniet uz pogas  vai .
4. Noklikšķiniet uz pogas , lai atainotu saglabāto notikumu sarakstu.
5. Iezīmējiet sarakstā vajadzīgo ierakstīto notikumu.
6. Noklikšķiniet uz pogas , lai skatītu notikumu.
7. Noklikšķiniet uz pogas  un ievadiet pacienta informāciju pēc nepieciešamības, lai saglabātu notikumu datorā.
8. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz , lai izdrukātu notikuma ierakstu.

Saver EVO lietošana

Zemāk ir redzams *Saver EVO* sākuma ekrāns.



Saver Evo sākuma ekrāns



HeartSine samaritan PAD — atver *PAD* defibrilatoram specifisko funkciju izvēlni. Skatiet 5. lpp., lai uzzinātu vairāk.



samaritan PDU — atver *PDU* defibrilatoram specifisko funkciju izvēlni. Skatiet 12. lpp., lai uzzinātu vairāk.



Pārvaldīt saglabātos notikumus (*Manage saved events*) — atver šajā datorā saglabātajiem notikumiem specifisko funkciju izvēlni. Skatiet 16. lpp., lai uzzinātu vairāk.



Iziet no *Saver EVO* (*Exit Saver EVO*) — aizver programmatūru *Saver EVO*.



Mainīt *Saver EVO* iestatījumus (*Change Saver EVO Settings*)— ļauj nomainīt *Saver EVO* paroli un atlasīt valodas iestatījumus. Ļauj lietotājam arī aplūkot informāciju par *Saver EVO* laidieniem.

Iepriekš minēto specifisko izvēlņu lietošana būs aprakstīta detalizētāk turpmākajās sadaļās.

Saver EVO lietošana kopā ar HeartSine samaritan PAD

To use Saver EVO with the HeartSine samaritan PAD you need to have the USB data cable that was supplied with the PAD or the Saver EVO software.

1. Lai lietotu Saver EVO kopā ar HeartSine samaritan PAD, jums nepieciešams USB datu kabelis, kas bija iekļauts PAD vai Saver EVO programmatūras komplektācijā. Izmantojot USB datu kabeli, pievienojiet to HeartSine samaritan PAD un USB portam jūsu datorā. Atveriet programmatūru Saver EVO.



2. Noklikšķinot uz HeartSine samaritan PAD pogas , tiks atvērts zemāk redzamais logs.



Saver EVO PAD piekļuves ekrāns



PAD dati (PAD Data) — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai izgūtu notikumu datus no PAD. Skatiet 6. lpp., lai uzzinātu vairāk.



Mainīt PAD iestatījumus (Change PAD Settings) — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai palaistu diagnostiskos testus vai izmainītu HeartSine samaritan PAD konfigurāciju (skaļumu, valodu vai laiku). Skatiet 8. lpp., lai uzzinātu vairāk.



Atpakaļ (Back) — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atgrieztos Saver EVO sākuma ekrānā.

Notikumu datu izgūšana no HeartSine samaritan PAD

Lai izgūtu defibrilācijas notikuma datus no HeartSine samaritan PAD, pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota



datoram, un tad noklikšķiniet uz pogas “PAD dati” (PAD Data). Tiks uzsākta meklēšana PAD atmiņā un uzskaitīti visi ierakstītie notikumi, parādot tos, kā redzams zemāk.



Saver EVO PAD notikumu žurnāla saraksta ekrāns

Notikumi, kuru teksts ir zaļā krāsā un kuriem pievienots simbols ✓, ir notikumi, kas jau ir saglabāti datorā.



Saglabāt visu (Save All) — noklikšķinot uz šīs pogas, visi notikumi, kas uzskaitīti PAD notikumu žurnālā, tiks saglabāti datorā vienā failā.

Piezīme. Šādā veidā saglabātus notikumus nevar izgūt skatīšanai ar šo Saver EVO versiju. Lai izgūtu notikumus no šī faila, sazinieties ar HeartSine Technologies klientu atbalsta dienestu. Lai saglabātu notikumus atsevišķi vēlākai izgūšanai, lūdzu, skatiet funkciju “Saglabāt” (Save) sadaļā **“Notikumu skatīšana HeartSine samaritan PAD ekrānā” 7. lpp.**



Skatīt (View) — noklikšķinot uz šīs pogas, tiek atainots atlasītais notikums.




Dzēst (Erase) — noklikšķinot uz šīs pogas, tiks dzēsti visi notikumi no PAD notikumu žurnāla. Skatiet 8. lpp., lai uzzinātu vairāk par datu dzēšanu.



Atpakaj (Back) — noklikšķinot uz šīs pogas, jūs atgriezīsieties Saver EVO PAD piekļuves ekrānā.

Notikumu skatīšana ierīcē *HeartSine samaritan PAD*


1. Lai skatītu notikumu, iezīmējiet notikumu sarakstā un tad noklikšķiniet uz pogas “Skatīt” (View) . Tiks atainots defibrilācijas notikums ar EKG līkni un notikumu žurnālu vienā skatīšanas logā.

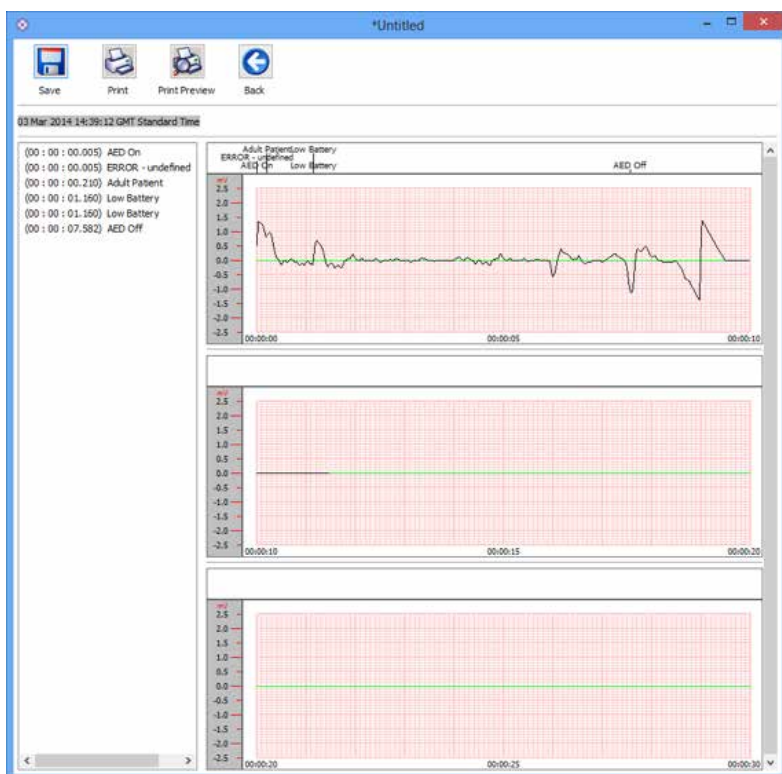

Saver EVO PAD notikumu skata logs

2. Tagad jūs varat izvēlēties saglabāt šo atainoto notikumu datorā, noklikšķinot uz pogas “Saglabāt” (Save) .

Šādā veidā saglabātos notikumus var izgūt un skatīt programmatūrā *Saver EVO*. Tas sniedz iespējas ievadīt informāciju, kas ļauj identificēt pacientu datorā saglabāto notikumu sarakstā. Informācija par pacientu var saturēt burtus un ciparus, un ikvienu lauku var aizpildīt vai atstāt tukšu, ja vēlaties.

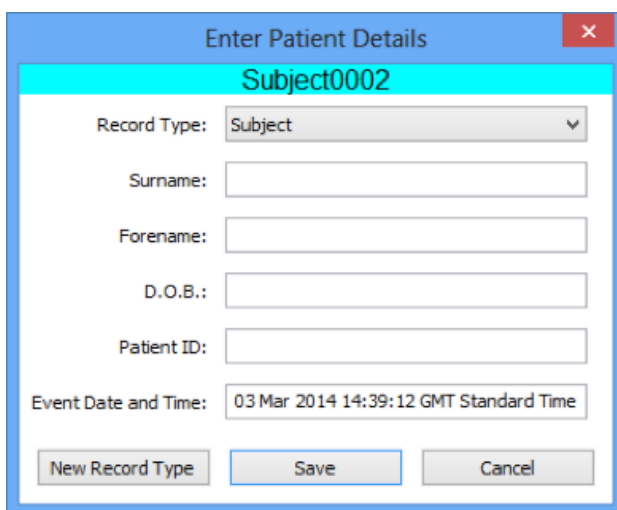

The screenshot shows the 'Enter Patient Details' dialog box. It has a title bar with a close button. The main area is divided into two sections. The top section, highlighted in cyan, contains the text 'Subject0002'. Below this, there are several input fields: 'Record Type' (a dropdown menu set to 'Subject'), 'Surname', 'Forename', 'D.O.B.', and 'Patient ID'. At the bottom, there is a field for 'Event Date and Time' showing '03 Mar 2014 14:39:12 GMT Standard Time'. At the very bottom, there are three buttons: 'New Record Type', 'Save', and 'Cancel'.

Saver EVO PAD pacienta informācijas logs

Piezīme. Tiklīdz defibrilācijas notikuma dati ir saglabāti jūsu datorā, šo informāciju nevar mainīt.

Saver EVO notikumu skata logs arī ietver šādas pogas:



Drukāt notikumu (*Print Event*) — noklikšķinot uz šīs pogas, tiek izdrukāts pašlaik skata logā atainotais notikums.



Drukas priekšskatījums (*Print Preview*) — noklikšķinot uz šīs pogas, ekrānā tiek atainots drukājamo datu priekšskatījums.



Atpakaļ (*Back*) — noklikšķinot uz šīs pogas, jūs atgriezīsieties Saver EVO PAD notikumu žurnāla saraksta ekrānā.

HeartSine samaritan PAD atmiņas dzēšana



1. Lai dzēstu HeartSine samaritan PAD atmiņu, noklikšķiniet uz pogas Dzēst (*Erase*) .
2. Piesardzības apsvērumu dēļ programmatūra Saver EVO lūgs jūs ievadīt paroli pirms atmiņas dzēšanas. Kad pareizā parole ir ievadīta, HeartSine samaritan PAD atmiņa tiks dzēsta. Lai uzzinātu, kā nomainīt noklusējuma paroli, lūdzu, skatiet sadaļu “**PAROLES UN VALODAS MAIŅA PROGRAMMATŪRĀ Saver EVO**” 18. lpp.

UZMANĪBU! HeartSine iesaka lejupielādēt visu PAD atmiņu pirms tās dzēšanas. Šo informāciju vajadzētu droši saglabāt uzziņas vajadzībām nākotnē.

Kad notikumu dati ir izgūti no HeartSine samaritan PAD un saglabāti datorā, ieteicams notikumus dzēst no PAD atmiņas. Tas nodrošinās, ka visa atmiņa ir pieejama cita defibrilācijas notikuma ierakstīšanai.

HeartSine samaritan PAD iestatījumu maiņa



PAD iestatījumu maiņas poga ļauj lietotājiem konfigurēt dažus HeartSine samaritan PAD iestatījumus:

- pārbaudīt/ iestatīt laiku;
- veikt diagnostikas testus.

Turklāt lietotāji ar attiecīgām pilnvarām var mainīt šādus iestatījumus:

- skaļums;
- valoda;
- iespējot/atspējot metronoma skaņu.



1. Noklikšķinot uz pogas “Mainīt PAD iestatījumus” (*Change PAD settings*) , jūs varēsiet piekļūt šim ekrānam (skatīt nākamo lappusi):



Saver EVO PAD iestatījumu maiņas logs

2.  Pārbaudīt/iestatīt **PAD** laiku (*Check/Set PAD time*) — šī poga ļauj lietotājam sinhronizēt *HeartSine samaritan PAD* un viņa datora laiku.



Saver EVO PAD laika pārbaudīšanas/iestatīšanas logs

3. Noklikšķinot uz pogas "Sinhronizēt" (*Synchronise*), laiks *HeartSine samaritan PAD* defibrilatorā tiks iestatīts uz tādu laiku, kāds redzams datorā, kuram tas ir pievienots.
4. Noklikšķiniet uz pogas "Aizvērt" (*Close*), lai atgrieztos *Saver EVO PAD* defibrilatora iestatījumu maiņas logā.



Palaist diagnostiskos testus (*Run Diagnostic Tests*) — šī poga ļauj lietotājam veikt dažus pamata testus, lai pārbaudītu *HeartSine samaritan PAD* funkcionēšanu. Pieejamo diagnostisko testu sarakstam piekļūst no nolaižamās izvēlnes, kā redzams tālāk.




Saver EVO PAD diagnostisko testu logs

Saver EVO noteiks pievienotā PAD defibrilatora veidu un atainos atbilstošās etiķešu ilustrācijas, lai vadītu lietotāju testu laikā.




Rediģēt PAD konfigurāciju (*Edit PAD Configuration*) — šī poga ļauj lietotājiem skatīt pievienotā PAD defibrilatora pašreizējo skaļumu, valodas un metronoma iestatījumus, kā arī tajā instalētās programmatūras versiju. PAD defibrilatora konfigurācijas logu (redzams tālāk) var izmantot, lai mainītu skaļuma līmeni, izvēlētos valodu un iespējotu vai atspējotu metronoma skaņu. Šīs izmaiņas var apstiprināt, tikai ievadot vajadzīgo paroli pēc pieprasījuma. Lai uzzinātu, kā nomainīt noklusējuma paroli, lūdzu, skatiet sadaļu **“PAROLES UN VALODAS MAIŅA PROGRAMMATŪRĀ Saver EVO”** 18. lpp.

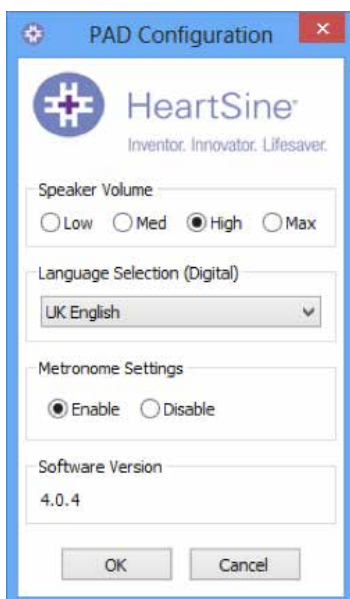

Saver EVO PAD konfigurācijas rediģēšanas logs

Valodu opcijām piekļūst no nolaižamās izvēlnes (valodu izvēles iespējas var būt ierobežotas līdz tām, kas ir ieprogrammētas ierīcē un/vai paredzētas tai valstij, kurā ierīce ir iegādāta).

Ja valoda ir nomainīta, lūdzu, pārbaudiet, vai tiek atainots apstiprināšanas logs, kā parādīts zemāk. Ja šis paziņojums netiek atainots pēc programmēšanas beigām, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto *HeartSine* izplatītāju vai tiešā veidā ar *HeartSine*.

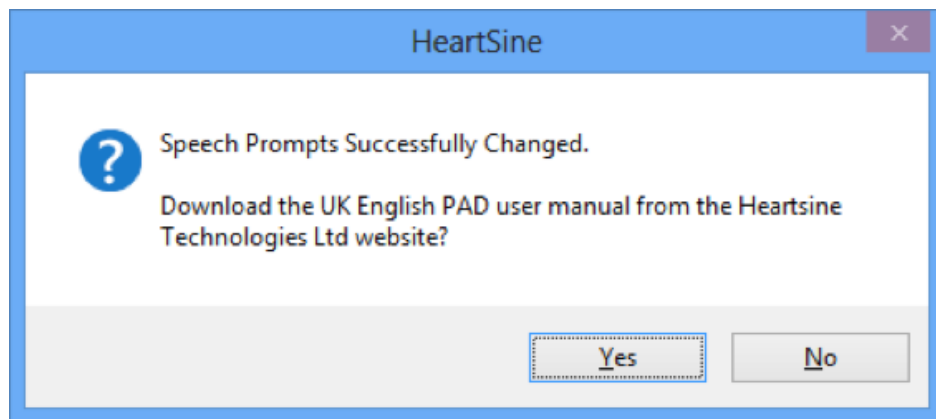

Un pārbaudiet, vai *PAD* defibrilatoram ir iestatīta valoda, ieslēdzot ierīci un noklausoties pirmos paziņojumus.

- Pieaugušais pacients/bērns pacients
- Izsaukt medicīnisko palīdzību (*Call for medical assistance*)

Kad esat pārliecināts(-a), ka ierīcē ir uzstādīta pareizā valoda, jūs varat izslēgt ierīci.

Saver EVO lietošana kopā ar PDU*

1. Lai lietotu Saver EVO kopā ar samaritan PDU atmiņas karti, jums jāievieto karte karšu lasītājā, kas atbalsta MMC/SD formātu un kas ir vai nu pievienots, vai nu iebūvēts datorā, kurā darbojas Saver EVO. Lūdzu, ņemiet vērā, ka var paiet dažas sekundas vai pat vairāk nekā minūte, pirms jūsu datora operētājsistēma atpazīst karti karšu lasītājā.



2. Noklikšķiniet uz PDU pogas. Tā atvērs zemāk atainoto apakšizvēlnes logu.



PDU dati (PDU Data) — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai izgūtu notikumu datus no PDU atmiņas kartes. Skatiet 13. lpp., lai uzzinātu vairāk.



PDU iestatījumi (PDU Settings) — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai skatītu konfigurācijas iestatījumus. Skatiet 15. lpp., lai uzzinātu vairāk.



Atpakaļ (Back) — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atgrieztos Saver EVO sākuma ekrānā.

* Nav pieejams ASV

Notikumu datu izgūšana no *PDU* atmiņas kartes

Pārliecinieties, ka *samaritan PDU* atmiņas karte ir ievietota SD/MMC karšu lasītājā un noklikšķiniet uz pogas “*PDU*

dati” (*PDU Data*) . Tādējādi tiks uzskaitīti notikumi, kas ir ierakstīti atmiņas kartē.



Notikumi ar pulksteņa simbolu  ir *PDU* pašpārbaudes testi, kas ir izdevušies sekmīgi.

Notikumi, kuru teksts ir zaļā krāsā un kuriem pievienots simbols , ir notikumi, kas jau ir saglabāti datorā.



Saglabāt visu (*Save All*) — šī poga *PDU* režīmā ir atspējota.



Skatīt (*View*) — noklikšķinot uz šīs pogas, tiek atainots atlasītais notikums. Skatiet 14. lpp., lai uzzinātu vairāk.



Dzēst (*Erase*) — šī poga *PDU* režīmā ir atspējota.




Atpakaļ (*Back*) — noklikšķinot uz šīs pogas, jūs atgriezīsieties *Saver EVO PDU* piekļuves ekrānā.

PDU saglabāto notikumu skatīšana



1. Lai skatītu notikumu, iezīmējiet notikumu sarakstā un tad noklikšķiniet uz pogas "Skatīt" (View).

Tiks atainots defibrilācijas notikums ar EKG līkni un notikumu žurnālu vienā skatīšanas logā:

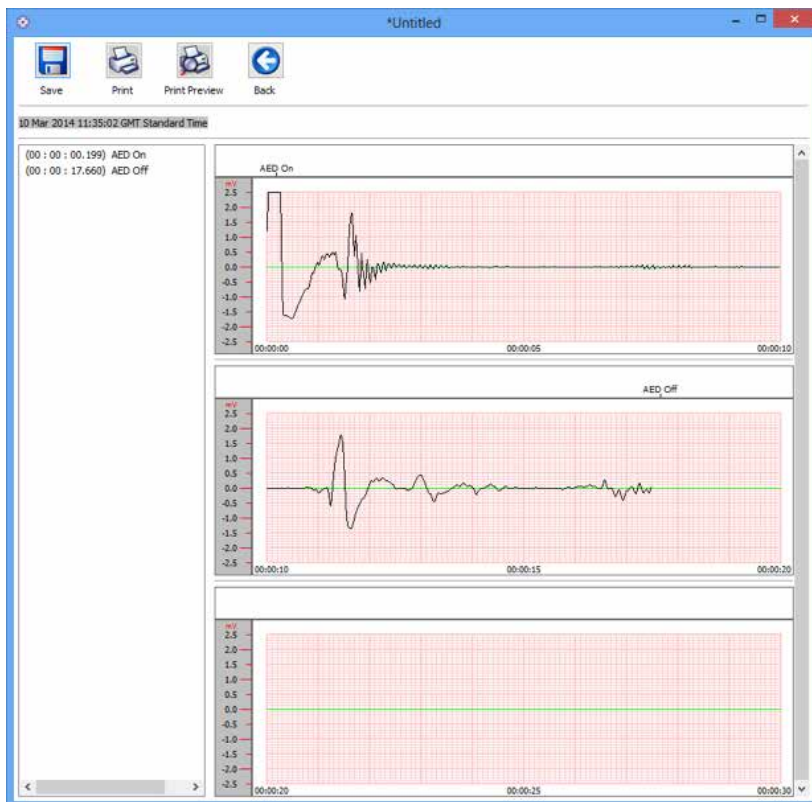


Saver EVO PDU notikumu skata logs

2. Tagad lietotājs var izvēlēties saglabāt šo atainoto notikumu datorā, noklikšķinot uz pogas "Saglabāt"



(Save). Tas sniedz iespējas ievadīt informāciju pacientu atpazīšanai. Informācija par pacientu var saturēt burtus un ciparus, un ikvienu lauku var aizpildīt vai atstāt tukšu, ja vēlaties.

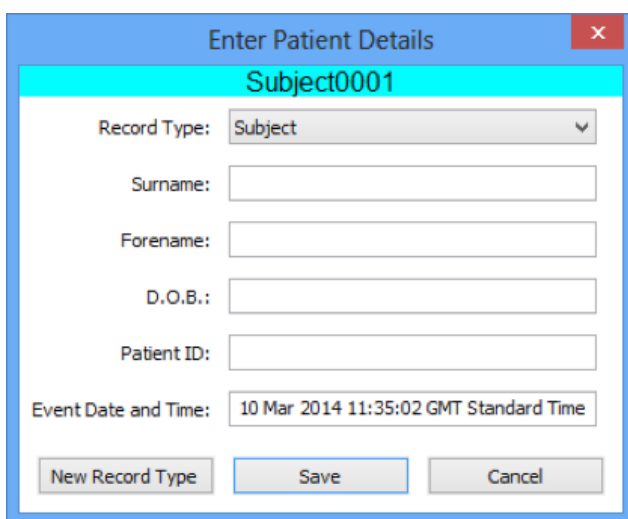

Saver EVO PDU pacienta informācijas logs

Piezīme. Tiklīdz defibrilācijas notikuma dati ir saglabāti jūsu datorā, šo informāciju nevar mainīt.

Saver EVO notikumu skata logs arī ietver šādas pogas:



Drukāt notikumu (*Print Event*) — noklikšķinot uz šīs pogas, tiek izdrukāts pašlaik skata logā atainotais notikums.



Drukas priekšskatījums (*Print Preview*) — noklikšķinot uz šīs pogas, ekrānā tiek atainots drukājamo datu priekšskatījums.




Atpakaļ (*Back*) — noklikšķinot uz šīs pogas, jūs atgriezīsieties Saver EVO PAD notikumu žurnāla saraksta ekrānā.

PDU iestatījumu skatīšana



Noklikšķinot uz pogas “Skatīt iestatījumus” (*View Settings*) jūs varēsiet piekļūt šim PDU konfigurācijas ekrānam. Šis ekrāns ļauj lietotājiem skatīt baterijas stāvokli, skaļruņu skaļumu, valodas un metronoma iestatījumus, CPR ātrumu un ilgumu un derīguma termiņu, programmatūras versiju un PDU ierīces sērijas numuru. Lietotājs var tikai skatīt šos iestatījumus, bet nevar veikt nekādas izmaiņas.

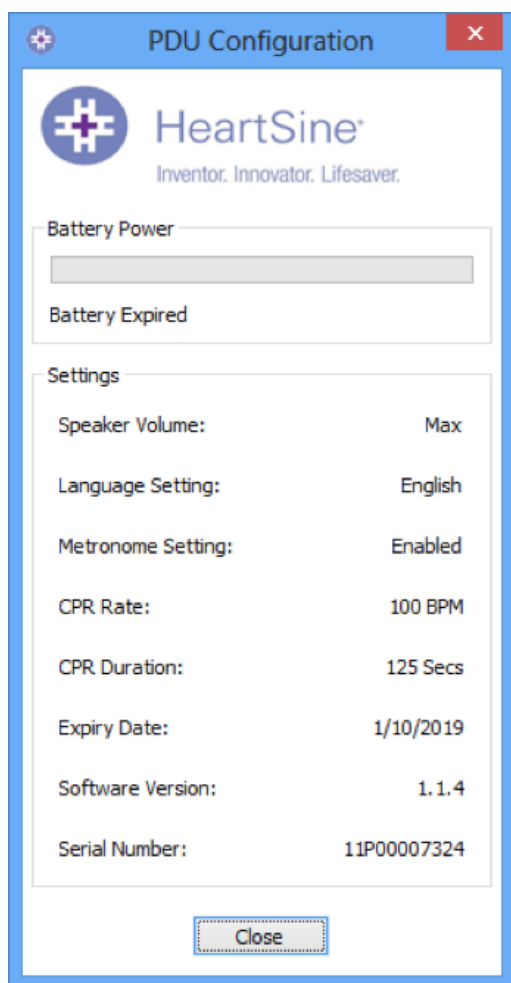

Saver EVO PDU iestatījumu skatīšanas logs

Saver EVO ar saglabātiem notikumiem lietošana



Poga “Pārvaldīt saglabātos notikumus” Manage Saved Events  Saver EVO galvenajā ekrānā ļauj lietotājam pārskatīt notikuma datus, kas ir lejupielādēti no *HeartSine samaritan PAD*, *samaritan Data-Pak* baterijas vai *PDU* atmiņas kartes un saglabāti datorā.

1. Noklikšķinot uz šīs pogas, tiks atvērts šāds logs



2. Iezīmējot notikumu sarakstā un noklikšķinot uz pogas “Skatīt” (View) , tiks atvērts saglabātais notikums, lai skatītu EKG datus un notikumu žurnālu.

Eksportēšana un importēšana

Programmatūrai *Saver EVO* ir funkcijas, kas ļauj lietotājiem nosūtīt defibrilācijas notikumu datus citiem cilvēkiem, kuriem ir programmatūra *Saver EVO*, kā arī saņemt tos. Lai nosūtītu vai saņemtu saglabāto notikumu kopijas, izmantojiet *Saver EVO* eksportēšanas un importēšanas funkcijas.

Notikumu eksportēšana

1. Saglabāto notikumu pārvaldīšanas ekrānā iezīmējiet notikumu vai notikumus, ko jūs vēlaties eksportēt un



noklikšķiniet uz pogas

2. Dators pieprasīs atrašanās vietu datorā, kur jūs vēlaties saglabāt eksporta failu, un arī ļaus jums izvēlēties eksportētā faila nosaukumu.
3. Noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt” (Save), lai saglabātu failu izvēlētajā atrašanās vietā.

Tad ir iespējams pievienot šo failu e-pasta ziņojumam, izmantojot jūsu parasto e-pasta programmatūru, un nosūtīt eksportēto failu citam lietotājam, kuram ir programmatūra *Saver EVO*.

Saver EVO notikumu datus var aplūkot tikai cits **Saver EVO** lietotājs. Iepriekšējā programmatūra **Saver** neimportēs un neatīnīs **Saver EVO** datus sekmīgi.

Notikumu importēšana

Lai importētu notikumus un skatītu tos savā datorā, fails, ko jums ir nosūtījis cits **Saver** vai **Saver EVO** lietotājs, jā saglabā kādā atrašanās vietā jūsu datorā.



1. **Saver EVO** saglabāto notikumu pārvaldīšanas ekrānā noklikšķiniet uz pogas .
2. Pārlūkojiet atrašanās vietu, kur fails ir saglabāts, un noklikšķiniet uz "Atvērt" (*Open*).
3. Ieraksti tiks pievienoti **Saver EVO** failu sarakstam jūsu datorā.

Tos pēc tam var skatīt, iezīmējot notikumu sarakstā un noklikšķinot uz pogas "Skatīt" (*View*).

Saver EVO pareizi importēs un atīnīs notikumu datus, kas tikuši eksportēti no iepriekšējās programmatūras versijas — **Saver**.

Saglabāto notikumu dzēšana

Saver EVO var dzēst saglabātos notikumus no jūsu datora atmiņas. Notikumi tiek dzēsti atsevišķi, atlasot notikumu(-s), ko dzēst (var atlasīt vairākus notikumus), un iezīmējot attiecīgo notikumu.

Kad jūs esat apstiprinājis(-usi), ka ir atlasīti tikai tie notikumi, ko vēlaties izdzēst, noklikšķiniet uz



pogas Dzēst (*Erase*). Piesardzības apsvērumu dēļ programmatūra **Saver EVO** lūgs jūs ievadīt paroli pirms atmiņas dzēšanas. Kad pareizā parole ir ievadīta, atmiņa par atlasītajiem notikumiem tiks dzēsta no jūsu datora.

UZMANĪBU! Lūdzu, pirms dzēšanas pārliecinieties, ka ir atlasīti tikai notikumi, ko jūs vēlaties dzēst. Tiklīdz tie ir dzēsti no jūsu datora, atmiņā saglabātos notikumus vairs nevar atjaunot un visa informācija ir zudusi.


Paroles un valodas maiņa programmatūrā Saver EVO

Programmatūrai Saver EVO ir dažas funkcijas, kuras var mainīt vai izpildīt, tikai ievadot paroli. Tādējādi programmatūras administratori var noteikt ierobežojumus, ka tikai pilnvaroti lietotāji var piekļūt noteiktām iespējām. Programmatūra Saver EVO tiek piegādāta ar iestatītu paroli, kas pēc noklusējuma ir password.

Lai nomainītu šo paroli uz savu, jums jārikojas, kā minēts turpmāk.



1. Šajā galvenajā Saver EVO ekrānā noklikšķiniet uz nelielās pogas . Tiks atvērts šis logs:

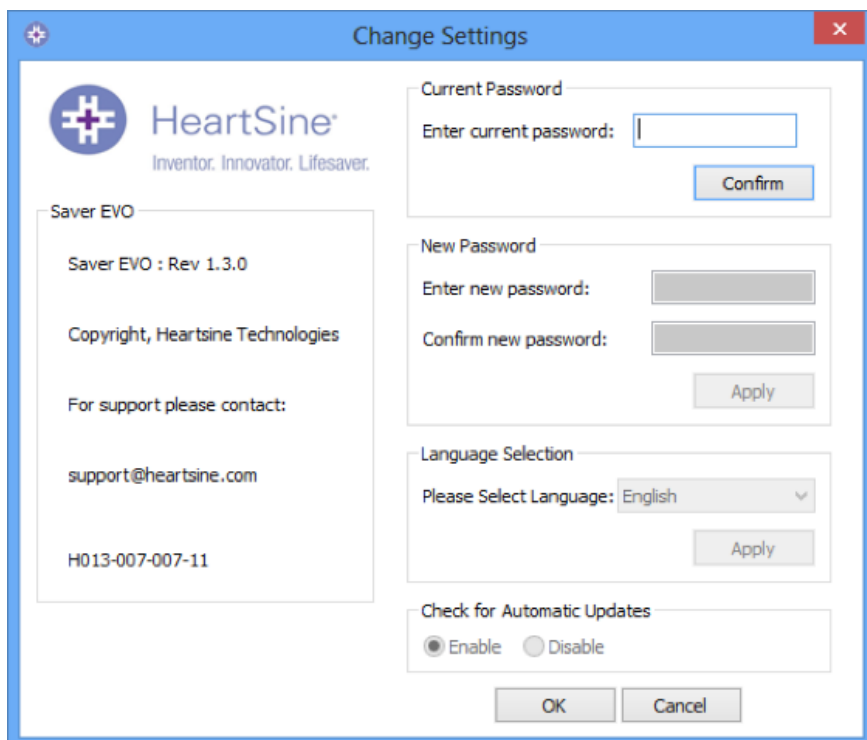


2. Ievadiet pašreizējo paroli un noklikšķiniet uz “Apstiprināt” (*Confirm*). Tas ļaus jums ievadīt un apstiprināt jauno paroli. Noklikšķiniet uz “Lietot” (*Apply*), lai veiktu izmaiņas. Parādīsies apstiprinājums, ka parole tikusi sekmīgi nomainīta. Noklikšķiniet uz “Labi” (*OK*) un tad atkal uz “Labi” (*OK*) paroles maiņas logā, lai izietu no šīs funkcijas loga.


Nemiet vērā, ka *Saver EVO* atkārtota instalēšana atiestatīs paroli uz programmatūras noklusējuma paroli. Tomēr šī darbība nedzēsīs iepriekš saglabātos notikumu datus.

Valodas atlase

1. Lai izvēlētos programmatūras *Saver EVO* valodu, atlasiet valodu nolaižamajā sarakstā un noklikšķiniet uz “Lietot” (*Apply*).

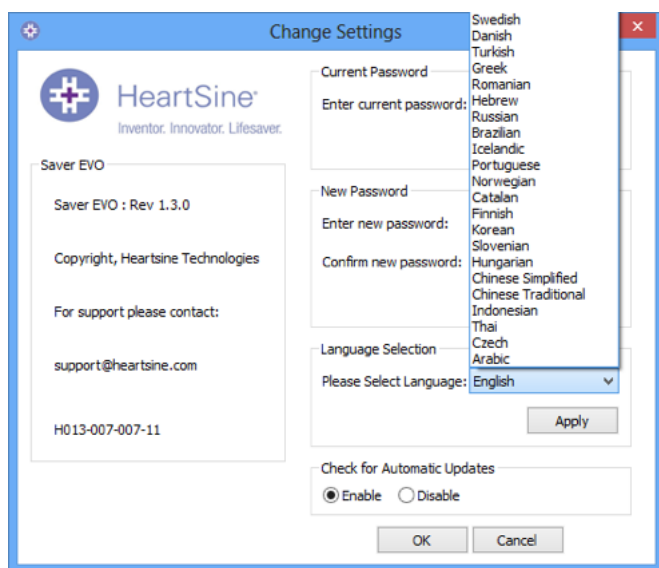

2. Noklikšķinot uz “Lietot” *Apply*, parādīsies zemāk redzamais ekrāns un *Saver EVO* būs jāpārstartē, lai valodas izmaiņas stātos spēkā.

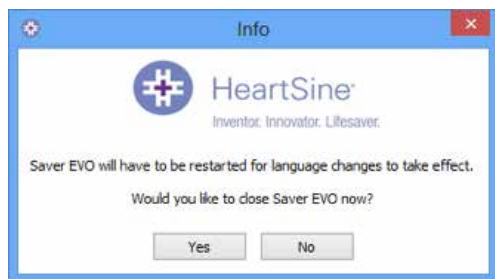

Pārbaudīt automātiskos atjauninājumus

1. Ja ir atlasīts lodziņš “Iespējot” (*Enable*), tad ikreiz, kad tiek startēta programmatūra *Saver EVO*, tā mēģinās savienoties ar HeartSine tīmekļa vietni, lai pārbaudītu, vai ir jaunāka *Saver EVO* versija. Ja ir pieejams atjauninājums, *Saver EVO* startēšanas laikā jums atainos zemāk redzamo logu.



2. Izvēlieties attiecīgi “Jā” (*Yes*) vai “Nē” (*No*), ja vēlaties lejupielādēt jaunāku *Saver EVO* versiju.

Lai saņemtu papildu informāciju, rakstiet mums uz adresi heartsinesupport@stryker.com vai apmeklējiet mūsu vietni www.heartsine.com.

EMEA/APAC

HeartSine Technologies, Ltd.
203 Airport Road West
Belfast, Northern Ireland
BT3 9ED
Tel: +44 28 9093 9400
Fax: +44 28 9093 9401 

U.S./Americas

HeartSine Technologies LLC
121 Friends Lane, Suite 400
Newtown, PA 18940
Toll Free: (866) 478 7463
Tel: +1 215 860 8100
Fax: +1 215 860 8192



© 2018 HeartSine Technologies LLC.
Visas tiesības aizsargātas.

H013-001-337-0 LV