



HeartSine®

Inventor. Innovator. Lifesaver.

19 februari 2013

VEILIGHEIDSBERICHT

Advies betreffende TRAINING, GEBRUIK, ONDERHOUD en BEWAKING van ALLE HEARTSINE-AED's

Geachte heer, mevrouw,

HeartSine Technologies heeft van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, *Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport*, het verzoek gekregen om iedereen in Nederland die een HeartSine Technologies AED bezit dit veiligheidsbericht te sturen. Hiermee benadrukken we dat het belangrijk is de aanbevelingen op te volgen ten aanzien van TRAINING, GEBRUIK, ONDERHOUD en BEWAKING van alle HeartSine-AED's - zoals opgenomen in de gebruikershandleiding die bij de apparaten wordt geleverd.

In de gebruikershandleiding zijn de volgende aanbevelingen voor deze onderwerpen opgenomen:

TRAINING: - HeartSine Technologies beveelt aan dat mogelijke gebruikers van een AED een reanimatiecursus (CPR) volgen én getraind worden in het gebruik van een automatische externe defibrillator. Het verdient tevens aanbeveling om deze vaardigheden up-to-date te houden door middel van opfriscursussen. De opleider kan hiervoor aanbevelingen geven.

GEBRUIK: - De HeartSine Technologies-AED's zijn bedoeld voor gebruik bij slachtoffers van plotselinge hartstilstand die de volgende symptomen vertonen:

- a) Bewusteloos
- b) Geen ademhaling
- c) Geen levensteken

HeartSine Technologies beveelt aan dat AED's op een veilige locatie in het zicht worden opgeborgen, in een wandbehuizing. Het apparaat moet worden bewaard op een goed toegankelijke en centrale locatie. Ideaal is als het wordt bewaard bij andere noodvoorzieningen, zoals EHBO-trommels, reanimatiepreparatiekits, brandblussers, enzovoorts. Indien mogelijk dient het apparaat in de buurt van een telefoon te worden bewaard, zodat de gebruiker 112 kan bellen en de AED erbij kan pakken zonder kostbare tijd te verliezen.

1. Zorg dat de AED altijd goed te bereiken is.
2. Bewaar het apparaat op een schone en droge locatie.
3. Het beste is een locatie met kamertemperatuur. Bewaar de AED niet op locaties waar het apparaat mogelijk (tijdelijk) aan extreme temperaturen wordt blootgesteld.
4. Bewaar bij de AED indien mogelijk ook bijbehorende reanimatie-accessoires, zoals: reanimatiemasker, scheermesje, schaar, enzovoorts.
5. Zorg dat de statusindicator van de AED goed zichtbaar is.
6. Informeer alle mogelijke gebruikers over de locatie van de AED.

H017-101-398-0



HeartSine®

Inventor. Innovator. Lifesaver.

ONDERHOUD: - HeartSine Technologies beveelt gebruikers aan om regelmatig onderhoudscontroles uit te voeren. Een goede onderhoudsroutine zou zijn:

- a) Controleer de statusindicator. Als de statusindicator niet knippert of **ROOD** knippert, is er een probleem gedetecteerd.
- b) Controleer de vervaldatum van het apparaat (indien van toepassing) en/of de accessoires.
- c) Controleer de verbruiksproducten, accessoires en reserveonderdelen op schade of vervaldatum.
- d) Controleer de buitenkant van de AED op scheurtjes of andere tekenen van beschadiging.
- e) Ga na of de getrainde reanimeerder op de hoogte is van de locatie van de AED, en of de AED te allen tijde toegankelijk is voor de reanimeerders.
- f) Ga na of de getrainde reanimeerders hun vaardigheden op gebied van reanimatie en gebruik van AED's middels trainingen hebben bijgehouden.

BEWAKING: - De AED's van HeartSine Technologies zijn uitgerust met een statusindicator. Dit is een indicator die om de vijf seconden groen knippert. Als de indicator groen knippert, is dat een indicatie dat de AED klaar is voor gebruik. Knippert de indicator **ROOD** of knippert de indicator niet, dan is er een probleem met het apparaat.

De AED's van HeartSine Technologies voeren iedere zondag precies om middernacht (GMT) een zelftest uit. Tijdens deze zelftest zal het statuslampje rood knipperen. Wordt de test goed doorstaan, dan wordt het lampje groen. De zelftest neemt niet meer dan 10 seconden in beslag.

HeartSine Technologies beveelt aan dat de gebruiker de AED niet regelmatig activeert om de werking ervan te controleren, daar dit de batterij voortijdig leeg trekt. Regelmatig het apparaat in- en uitschakelen is niet nodig, daar de statusindicator de gebruiker informeert als er een probleem is met het apparaat.

HeartSine Technologies raadt ten sterkste aan alle gebruikers van AED's op de hoogte te stellen van de inhoud van dit veiligheidsbericht. De apparatuur blijft dankzij training, gebruik, onderhoud en bewaking conform onze aanbevelingen operationeel en kan direct worden ingezet bij een plotselinge hartstilstand.

Dit bericht moet worden doorgestuurd naar iedereen binnen uw organisatie of andere organisaties waar AED's heen zijn gebracht.

Breng dit bericht daarom regelmatig onder de aandacht en ga na of de juiste vervolgstappen worden genomen.

Met vriendelijke groet,

Declan O'Mahoney
President en CEO
HeartSine Technologies Ltd.

H017-101-398-0