




HeartSine samaritan® PAD
350P Trainer
דגם TRN-350-1
מדריך למשתמש

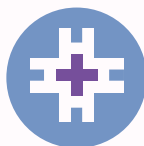

HeartSine®

מדריך למשתמש זה מספק הוראות כיצד להפעיל את ה-HeartSine PAD 350P Trainer.

ה-HeartSine PAD 500P Trainer הוא מכשיר לא-רפואי המיועד להכשרת צוותי חירום לגבי השימוש ההולם בדפיברילטור חיצוני אוטומטי HeartSine PAD 350P. למכשיר התרגול (Trainer) אין יכולות מרפאות, ואין להשתמש בו במצבים אמיתיים הדורשים הצלת חיים.

חשוב: על מנת להימנע מבלבול במקרה אמיתי של הצלת חיים, אין לאחסן או להשאיר את מכשיר התרגול (Trainer) ליד הדפיברילטור החיצוני האוטומטי HeartSine PAD.



על מנת לאפשר זיהוי מהיר וקל, ה-HeartSine PAD 500P Trainer כולל ממברנת ממשק משתמש צהובה בחזית, בעוד שלדפיברילטור חיצוני אוטומטי HeartSine PAD 350P יש ממברנה חזיתית בצבע כחול/כהה/שחור.

HeartSine ממליצה שאנשי צוותי חירום, שעשויים להשתמש באחד מהדפיברילטורים שלה, יקבלו הכשרה בהחייאה עם שימוש בדפיברילטור (CPR-D). ה-HeartSine PAD 500P Trainer מיועד לשימוש על ידי מדריכי CPR-D המאושרים למטרה זו.

ה-HeartSine PAD 350P Trainer עבר קונפיגורציה במפעל לפעול בהתאם לקווים המנחים המשותפים של התאחדות הלב האמריקאית/מועצת ההחייאה האירופאית משנת 2010 לגבי החייאה. המכשיר מגיע עם שישה תרחישים מתוכנתים מראש המבוססים על קווים מנחים אלו.

באם הקווים המנחים בנוגע להחייאה ישתנו, התוכנה תהיה זמינה לשדרוג ה-HeartSine PAD 350P Trainer כדי לעמוד בהם. נא לפנות למפיץ המורשה של HeartSine שלך או ל-HeartSine Technologies ישירות.

עם הפעלתו, ה-HeartSine PAD 350P Trainer ישמיע הנחיות קוליות עם מחוונים ויזואליים מלווים. ניתן גם לשלוט ידנית ב-Trainer באמצעות השלט הרחוק המלווה הכלול עם המכשיר.

נא לפנות למפיץ של HeartSine המורשה שלך לקבלת רשימה של אביזרי חילוף.

- (1) יש לוודא שה-HeartSine PAD 350P Trainer טעון באופן מלא (עין בסעיף של הטעינה במדריך זה).
- (2) יש להניח את ה-HeartSine PAD 350P Trainer ואת חבילת רפידות התרגול (Trainer Pad-Pak) על משטח שטוח. יש לדחוף את חבילת רפידות התרגול לפתח של ה-HeartSine PAD 350P Trainer ולהאזין לצליל נקישה כדי לוודא שהחבילה הוכנסה בצורה הולמת.
- (3) יש להכניס את הסוללות המסופקות עם מכשיר התרגול שלך לשלט הרחוק של HeartSine PAD.

✎ אין ללחוץ על אף לחצן כאשר מכניסים את סוללות השלט הרחוק משום שזה יאפס את זיהוי השלט הרחוק.
- (4) יש ללחוץ על הלחצן On/Off שב-HeartSine PAD 350P Trainer ולהקשיב להנחיות הקוליות כדי לוודא שהיחידה מתפקדת.
- (5) אם ה-HeartSine PAD 350P Trainer אינו טעון מספיק, הוא לא יתפקד כראוי. כשמדליקים אותו, מחוון המצב יהבהב באדום כדי להתוות שיש צורך בטעינה. אם הסוללה מרוקנת לגמרי, המכשיר לא יידלק בכלל. להוראות מלאות לגבי טעינה, יש לראות את הסעיף של טעינה במדריך זה.

הפעלה וכיבוי של ה-HeartSine PAD 350P Trainer

כדי להדליק את ה-HeartSine PAD 350P Trainer יש ללחוץ על הלחצן הירוק של On/Off.



- ✎ כבירת המחדל, מכשיר התרגול יתפקד במסגרת הגדרת התרחיש האחרון שנעשה בו שימוש.
- כדי לכבות את ה-HeartSine PAD 350P Trainer יש ללחוץ שוב על הלחצן הירוק של On/Off.
- לאחר הדלקת ה-HeartSine PAD 350P Trainer, ניתן לכבות אותו באמצעות השלט הרחוק שסופק איתו. על מנת לכבות את מכשיר התרגול, יש ללחוץ על הלחצן Off (לחצן אדום) שבשלט הרחוק.
- לאחר שה-HeartSine PAD 350P Trainer הודלק, הוא יכבה את עצמו אוטומטית לאחר חמש עשרה דקות באם לא נעשה בו שימוש.
- ✎

HeartSine PAD 350P Trainer



- א יציאת נתונים
- ב נורית חיווי מצב טעינת סוללה
- ג מחוון מצב
- ד לחצן הלב חשמלי
- ה מחוון 'בטוח למגע'
- ו רמקול
- ז מחסנית Pad-Pak
- ח לחצן הפעולה/כיבוי
- ט מחוון 'לא לגעת'
- י מחוון הנחת הרפידות
- יא חצי פעולה

חצי פעולה

חצי הפעולה מסביב לסמל 'הבהבו' כדי להתוות את הפעולות שעל המשתמש לבצע.



מחוון 'לא לגעת'

אין לגעת במטופל כאשר חצי הפעולה שמסביב לסמל זה מהבהבים. יתכן שה-PAD 350P מנתח את קצב הלב של המטופל, או עומד להעביר הלב חשמלי.



מחוון מצב

אור ירוק מהבהב - מכשיר התרגול מוכן לשימוש
אור אדום מהבהב - יש צורך לטעון את מכשיר התרגול



לחצן הלב חשמלי

יש ללחוץ על לחצן זה כדי לדמות טיפול של הלב חשמלי.



לחצן הפעולה/כיבוי

יש ללחוץ על לחצן זה כדי להדליק או לכבות את המכשיר. (אם נלחץ בזמן שמומלץ על מתן הלב חשמלי, תופיע האזהרה "אזהרה, לחצן הכיבוי נלחץ"; המכשיר לא יכובה אלא אם תלחץ שוב על הלחצן תוך שלוש שניות).



מחוון הנחת הרפידות

חצי הפעולה מסביב לסמל זה 'הבהבו' כדי להורות למשתמש ב-PAD 350P להצמיד את הרפידות למטופל כפי שמוצג.



מחוון 'בטוח למגע'

הנגיעה במטופל בטוחה כאשר החיכים שמסביב לסמל זה מהבהבים. ניתן לבצע החייה או לבדוק את המטופל.



שימוש באלקטרודות


תרחישי התרגול כוללים הנחיות קוליות להסרת האלקטרודות מחבילת הרפידות, ולהניח את רפידות האלקטרודות כפי שמתווה. יש למלא אחר הצעדים להלן עם קבלת ההנחיות לעשות זאת.

- (1) יש למשוך את הלשונית הירוקה כדי לפתוח את מחסנית ה-Trainer Pad-Pak ולשחרר לגמרי את כבלי האלקטרודות.
- (2) יש לקלף את רפידות האלקטרודות מהכיסוי המגן שלהן.
- (3) יש להניח את רפידות האלקטרודות כפי שמתווה על ידי מחוון הצבת הרפידות; ניתן לזהות בבירור את רפידות האלקטרודות של עצם החזה והצד ברפידות הרלוונטיות שלהן.
- (4) יש ללחוץ בחוזקה על הרפידות כדי לוודא שבוצע מגע הולם.

החזרת האלקטרודות לאחר שימוש

- (1) יש להצמיד מחדש את הכיסוי המגן לרפידות האלקטרודות, או להחליף ברפידות חדשות.
- (2) יש לקפל את הרפידות ביחד, כך שהכיסוי הוא מבחוץ.
- (3) יש לאפשר לאלקטרודות להיתלות מהמכשיר, ולהשתמש בידיית שבמנגנון הגלגול הכחול כדי להחזיר את האלקטרודות עד הסוף.

א ב
מנגנון גלגול
ידיית גלגול

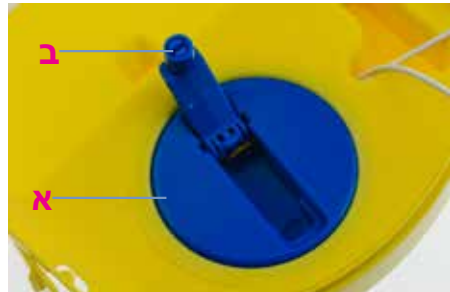

- (4) יש להניח את הרפידות מעל למחסנית ה-Pad-Pak, ולוודא שהחוטים נמצאים מתחת לרפידות.
- (5) יש לסגור את מחסנית ה-Pad-Pak על ידי החלקת המגש הצהוב למקומו.

השלט הרחוק של ה-PAD 350P Trainer

א לחצן כיבוי
ב בקרת עוצמת קול
ג מחוון סוללה חלשה
ד לחצן ההשהיה
ה תרחיש 'לא מומלץ לתת הלב'
ו חשמלי'
ז תרחיש 'מומלץ לתת הלב חשמלי'
ח בחר בתרחיש הצמד רפידות אלקטרודות



כיבוי מכשיר התרגול

ניתן להשתמש בשלט הרחוק כדי לכבות את ה-HeartSine PAD 350P Trainer. כדי לכבות את מכשיר התרגול יש ללחוץ על הלחצן האדום שבשלט הרחוק.



שינוי עוצמת הקול

ישנן ארבע הגדרות עוצמת קול זמינות ב-HeartSine PAD 350P Trainer. לחצני בקרת עוצמת הקול נמצאים משמאל ללחצן הכיבוי שבשלט הרחוק. כדי להגביר את עוצמת הקול, יש ללחוץ על הלחצן '4' וכדי להנמיך את עוצמת הקול, יש ללחוץ על הלחצן '1'.



השהיית מכשיר התרגול

ניתן להשהות את ה-HeartSine PAD 350P Trainer במהלך התרגול. כדי להשהות את מכשיר התרגול יש ללחוץ על לחצן ההשהיה (||/▶). מכשיר התרגול יישאר בהשהיה עד שלחצן ההשהיה ילחץ שוב, ואז הוא ימשיך בהפעלת התרחיש שנבחר.



שינוי התרחיש

ה-HeartSine PAD 350P Trainer מגיע עם שישה תרחישי תרגול מתוכנתים מראש. (לקבלת פרטים לגבי התרחישים, ראה את סעיף תרחישי התרגול במדריך זה). ניתן לשנות את התרחיש על ידי לחיצה על לחצן המספר המתאים בשלט הרחוק, לדוגמה: לחיצה על '3' תבחר בתרחיש התרגול השלישי.



לאחר שהתרחיש שונה, המכשיר יפעל כפי שמפורט בסעיף התרחישים. המכשיר ישאר בתרחיש זה עד שייבחר תרחיש חדש.

יש ל-HeartSine PAD 350P Trainer שישה תרחישי תרגול מתוכנתים מראש לבחירה. כל התרחישים המתוכנתים מראש מבוססים על הקווים המנחים של 2010 AHA/ERC. הפרטים של התרחישים הם כדלקמן:

תרחיש 1

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. מצב התקנה | - | "קריאה לסייע רפואי", "משוך את הלשונית הירוקה", וכו' |
| 2. התערבות משתמש | - | לחצן ה"רפידות" שיש ללחוץ עליו כדי לאשר שהאלקטרודות הונחו |
| 3. מצב מוניטור | - | "בדוק את קצב הלב", "לא לגעת במטופל", וכו' |
| 4. יש צורך לתת הלם חשמלי | - | על המשתמש ללחוץ על לחצן ההלם החשמלי |
| 5. מצב החייאה | - | על המשתמש לעשות החייאה עם ייעוץ כפי שנדרש |
| 6. מצב מוניטור | - | "בדוק את קצב הלב", "לא לגעת במטופל", וכו' |
| 7. אין צורך לתת הלם חשמלי | - | על המשתמש לעשות החייאה עם ייעוץ כפי שנדרש |
| 8. מצב החייאה | - | נעשתה חזרה על צעדים 6 עד 8 עד שנלחץ הלחצן 'On/Off' |
| 9. חזור | - | |

תרחיש 2

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. מצב התקנה | - | "קריאה לסייע רפואי", "משוך את הלשונית הירוקה", וכו' |
| 2. התערבות משתמש | - | לחצן ה"רפידות" שיש ללחוץ עליו כדי לאשר שהאלקטרודות הונחו |
| 3. מצב מוניטור | - | "בדוק את קצב הלב", "לא לגעת במטופל", וכו' |
| 4. אין צורך לתת הלם חשמלי | - | על המשתמש לעשות החייאה עם ייעוץ כפי שנדרש |
| 5. מצב החייאה | - | "בדוק את קצב הלב", "לא לגעת במטופל", וכו' |
| 6. מצב מוניטור | - | על המשתמש ללחוץ על לחצן ההלם החשמלי |
| 7. יש צורך לתת הלם חשמלי | - | על המשתמש לעשות החייאה עם ייעוץ כפי שנדרש |
| 8. מצב החייאה | - | נעשתה חזרה על צעדים 6 עד 8 עד שנלחץ הלחצן 'On/Off' |
| 9. חזור | - | |

תרחיש 3

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. אלקטרודות | - | המכשיר מניח שהאלקטרודות הוצמדו כבר |
| 2. מצב מוניטור | - | "בדוק את קצב הלב", "לא לגעת במטופל", וכו' |
| 3. בדוק רפידות | - | "בדוק רפידות" |
| 4. התערבות משתמש | - | לחצן ה"רפידות" שיש ללחוץ עליו כדי לאשר שהאלקטרודות הונחו |
| 5. מצב מוניטור | - | "בדוק את קצב הלב", "לא לגעת במטופל", וכו' |
| 6. יש צורך לתת הלם חשמלי | - | על המשתמש ללחוץ על לחצן ההלם החשמלי |
| 7. מצב החייאה | - | על המשתמש לעשות החייאה עם ייעוץ כפי שנדרש |
| 8. מצב מוניטור | - | "בדוק את קצב הלב", "לא לגעת במטופל", וכו' |
| 9. אין צורך לתת הלם חשמלי | - | על המשתמש לעשות החייאה עם ייעוץ כפי שנדרש |
| 10. מצב החייאה | - | נעשתה חזרה על צעדים 3 עד 10 עד שנלחץ הלחצן 'On/Off' |
| 11. חזור | - | |

תרחיש 4

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. אלקטרודות | - | המכשיר מניח שהאלקטרודות הוצמדו כבר |
| 2. מצב מוניטור | - | "בדוק את קצב הלב", "לא לגעת במטופל", וכו' |
| 3. יש צורך לתת הלם חשמלי | - | על המשתמש ללחוץ על לחצן ההלם החשמלי |
| 4. מצב החייאה | - | על המשתמש לעשות החייאה עם ייעוץ כפי שנדרש |
| 5. מצב מוניטור | - | "בדוק את קצב הלב", "לא לגעת במטופל", וכו' |
| 6. יש צורך לתת הלם חשמלי | - | על המשתמש ללחוץ על לחצן ההלם החשמלי |
| 7. מצב החייאה | - | על המשתמש לעשות החייאה עם ייעוץ כפי שנדרש |
| 8. מצב מוניטור | - | "בדוק את קצב הלב", "לא לגעת במטופל", וכו' |
| 9. אין צורך לתת הלם חשמלי | - | על המשתמש לעשות החייאה עם ייעוץ כפי שנדרש |
| 10. מצב החייאה | - | נעשתה חזרה על צעדים 5 עד 10 עד שנלחץ הלחצן 'On/Off' |
| 11. חזור | - | |

תרחיש 5

תרחיש 5 זהה לתרחיש 1, אלא שיש לו גם התוויות קוליות לגבי מתי לבצע הנשמה במהלך מצב החייאה.

1. מצב התקנה -
 2. התערבות משתמש -
 3. מצב מוניטור -
 4. יש צורך לתת הלם חשמלי -
 5. מצב החייאה -
- על המשתמש לעשות החייאה עם ייעוץ כפי שנדרש; זה כולל התוויה קולית לגבי מתי לבצע הנשמה - המטרונום משתנה מצפצוף לתקתוק במשך עשרה עיטוים.
- "בדוק את קצב הלב", "לא לגעת במטופל", וכו'
6. מצב מוניטור -
 7. אין צורך לתת הלם חשמלי -
 8. מצב החייאה -
- על המשתמש לעשות החייאה עם ייעוץ כפי שנדרש; זה כולל התוויה קולית לגבי מתי לבצע הנשמה - המטרונום משתנה מצפצוף לתקתוק במשך עשרה עיטוים.
- נעשתה חזרה על צעדים 6 עד 8 עד שנלחץ הלחצן 'On/Off'
9. חזור -

תרחיש 6

תרחיש 6 זהה לתרחיש 2, אלא שיש לו גם התוויות קוליות לגבי מתי לבצע הנשמה במהלך מצב החייאה.

1. מצב התקנה -
 2. התערבות משתמש -
 3. מצב מוניטור -
 4. אין צורך לתת הלם חשמלי -
 5. מצב החייאה -
- על המשתמש לעשות החייאה עם ייעוץ כפי שנדרש; זה כולל התוויה קולית לגבי מתי לבצע הנשמה - המטרונום משתנה מצפצוף לתקתוק במשך עשרה עיטוים.
- "בדוק את קצב הלב", "לא לגעת במטופל", וכו'
6. מצב מוניטור -
 7. יש צורך לתת הלם חשמלי -
 8. מצב החייאה -
- על המשתמש לעשות החייאה עם ייעוץ כפי שנדרש; זה כולל התוויה קולית לגבי מתי לבצע הנשמה - המטרונום משתנה מצפצוף לתקתוק במשך עשרה עיטוים.
- נעשתה חזרה על צעדים 6 עד 8 עד שנלחץ הלחצן 'On/Off'
9. חזור -

השלט הרחוק מאפשר לספקי התרגול לשלוט בתרחיש באופן ידני. כאשר זה מופעל, ה-HeartSine PAD 350P Trainer יפעל כפי שמפורט בתרחישי התרגול הרשומים. ספקי תרגול יכולים לעקוף את זה על ידי לחיצה על הלחצן 'יש צורך לתת הלב חשמלי', 'אין צורך לתת הלב חשמלי' או 'הצמד רפידות אלקטרודות'.

מומלץ הלב חשמלי

לחיצה על הלחצן 'מומלץ הלב חשמלי' יגרום ל-HeartSine PAD 350P Trainer לעקוף את תרחיש התרגול הנבחר ולדמות קצב שיש לתת בו הלב חשמלי. כל תקופת ניתוח עוקבת תייעץ לתת הלב חשמלי עד שמכשיר התרגול יכובה או שיילחץ הלחצן 'לא מומלץ הלב חשמלי' בשלט הרחוק.



לא מומלץ הלב חשמלי

לחיצה על הלחצן 'לא מומלץ הלב חשמלי' תגרום ל-HeartSine PAD 350P Trainer לעקוף את תרחיש התרגול שנבחר ולדמות קצב שאין לתת בו הלב חשמלי. כל תקופת ניתוח עוקבת תייעץ לא לתת הלב חשמלי עד שמכשיר התרגול יכובה או שיילחץ הלחצן 'מומלץ הלב חשמלי' בשלט הרחוק.



הצמד רפידות אלקטרודות

אם נלחץ הלחצן 'הצמד רפידות אלקטרודות', מכשיר התרגול יפעיל את הנחיות 'הצמד את האלקטרודות' במהלך תקופת הניתוח של ההפעלה. מכשיר התרגול ימשיך להפעיל את הנחיות 'הצמד את האלקטרודות' עד שיילחץ שוב הלחצן 'הצמד רפידות אלקטרודות'.



ניהול סוללת HeartSine PAD 350P Trainer

ה-HeartSine PAD 350P Trainer מכיל סוללה נטענת. מומלץ לזווד שה-HeartSine PAD 350P Trainer טעון לגמרי לפני שמתחילים בפעילויות תרגול.

כאשר הוא טעון לגמרי, ה-HeartSine PAD 350P Trainer יספק לך כשבע שעות שימוש לפני שיהיה צורך לטעון אותו שוב. ה-HeartSine PAD 350P Trainer ינטר את קיבולת הסוללה כשהיא מתקרבת להתרוקנות. שעה אחת לפחות לפני שהסוללה מתרוקנת, מכשיר התרגול ישמיע את ההודעה הבאה:

"אזהרה. סוללה חלשה" 

אם אזהרה זו הושמעה, באפשרותך להמשיך להשתמש ב-HeartSine PAD 350P Trainer שלך למשך פרק זמן מוגבל. אם הסוללה התרוקנה לחלוטין, מכשיר התרגול יכבה את עצמו. בשלב זה, יש לטעון שוב את מכשיר התרגול.

טעינה וטעינה מחדש של ה-HeartSine PAD 350P Trainer

כדי לטעון או לטעון מחדש באופן בטוח את ה-HeartSine PAD 350P Trainer, יש למלא אחר ההוראות להלן.

- (1) יש להכניס את מתאם המטען לשקע שבצד של ה-HeartSine PAD 350P Trainer. יש לזווד שהמתאם הוכנס פנימה עד הסוף.
- (2) יש לחבר את המטען לאספקת החשמל המרכזית.
- (3) יש להניח למכשיר התרגול להיטען. נורית החיווי (LED) של מצב טעינת הסוללה (הנמצאת ליד השקע) תאיר באדום בעת טעינה מהירה, ותהבהב כאשר הטעינה כמעט הושלמה. עם השלמת הטעינה נורית החיווי תיכבה. כדי לטעון HeartSine PAD 350P Trainer מרוקן, יש צורך בשש שעות לכל היותר.
- (4) יש להסיר את המתאם מה-HeartSine PAD 350P Trainer. יש להפעיל את מכשיר התרגול כדי לזווד שהמכשיר פועל.

אם ה-HeartSine PAD 350P Trainer דולק בעת הטעינה, יש לכבות ולאחר מכן להדליק שוב את המטען כדי לאתחל בטעינה מהירה.

יש לטעון את ה-HeartSine PAD 350P Trainer רק עם המטען שסופק איתו. שימוש בכל מכשיר טעינה אחר יבטל את האחריות ויתכן שיגרם לנזק ל-HeartSine PAD 350P Trainer.

ה-HeartSine PAD 350P Trainer והמטען מיועדים לשימוש בתוך מבנים בלבד. אין להשתמש בסביבות רטובות או לחות. אין חלקים הניתנים לשירות בידי המשתמש בתוך ה-HeartSine PAD 350P Trainer, HeartSine PAD 350P Trainer או המטען שלך. אין לפתוח מוצרים אלו. במקרה יוצא הדופן של תפקוד לקוי, נא לפנות מייד למפיץ שלך.

סוללות השלט הרחוק

השלט הרחוק של ה-HeartSine PAD 350P Trainer כולל מחוון אזהרה לגבי סוללה חלשה. אם מחוון זה מהבהב באור אדום פעמיים לאחר לחיצה על לחצן בשלט הרחוק, זו התוויה שיש צורך להחליף את הסוללות שבשלט הרחוק.

השלט הרחוק מופעל על ידי שתי סוללות AAA רגילות.

ניתן לגשת לסוללות באמצעות הסרת מכסה הסוללות בגב השלט הרחוק.

 הכנסת הסוללות לשלט הרחוק תוך כדי לחיצה על הלחצן Off תגרום לשלט הרחוק להיכנס למצב צימוד ולקחת קוד זיהוי תמסורת חדש. זה יהיה שונה מהקוד שאוחסן בעבר במכשיר התרגול. אם זה קורה בשוגג, יש צורך להשלים את הליך הצימוד במלואו ולצמד שוב את השלט הרחוק עם ה-HeartSine PAD 350P Trainer.

החלפה רגילה של סוללות לא גורמת לבעיה משום שצימוד נעשה רק כאשר הלחצן Off נלחץ באותו הזמן.

כלי קונפיגורציה של ה-HeartSine PAD 350P Trainer

כלי הקונפיגורציה של ה-HeartSine PAD 350P Trainer הוא תוכנה שניתן להוריד בחינם מאתר האינטרנט של HeartSine (www.heart sine.com). תוכנה זו מאפשרת לך לשדרג את מכשיר התרגול שלך. האפשרויות הבאות זמינות:

שפה

ניתן לתכנת מחדש את ה-HeartSine PAD 350P Trainer לפעול עם הנחיות קוליות בכל אחת מהשפות המוצעות לבחירה. יש להוריד את המדריך למשתמש של כלי הקונפיגורציה העדכני של HeartSine PAD 350P Trainer מאתר האינטרנט של HeartSine לקבלת הוראות לגבי כיצד לעשות זאת.

צימוד השלט הרחוק עם ה-HeartSine PAD 350P Trainer

לכל אחד ממכשירי HeartSine PAD 350P Trainer יש שלט רחוק ספציפי להפעלתו. זה מיועד לאפשר לשימוש במכשירים מרובים קרוב זה לזה ללא הפרעה. במקרה הנדיר שהשלט הרחוק שלך לא פועל יותר עם מכשיר התרגול שלך, יתכן שצריך לצמד אותו שוב עם מכשיר התרגול שלך.

ניתן להשתמש בכלי הקונפיגורציה של ה-HeartSine PAD 350P Trainer כדי לצמד שלט רחוק למכשיר התרגול שלך. מדריך ההוראות למשתמש המלווה מכיל הוראות מלאות.

מזהי מכשירים

לכל מכשיר HeartSine PAD 350P Trainer Each ניתן מספר זיהוי בין 001 ל-255 בעת הייצור. לשלט הרחוק עבור כל Trainer ניתן אז אותו מספר זיהוי. במקרה החריג שנעשה שימוש בשני מכשירים עם אותו מספר זיהוי בה-בעת, יש להשתמש בכלי הקונפיגורציה של HeartSine PAD 350P Trainer כדי להקצות למכשירים מספרים חדשים. לאחר הקצאת מספר זיהוי חדש, יהיה צורך לצמד את המכשיר עם השלט הרחוק שלך.

להלן סקירה קצרה של עקרונות החייאה עבור אנשים מזדמנים המבצעים החייאה, כפי שמועץ על ידי התאחדות הלב האמריקאית (AHA) ומועצת ההחייאה האירופאית (ERC) כאחת בקווים המנחים שלהם שפורסמו ב-2010 לגבי החייאה מסורתית והחייאת עיטיים בלבד. זה מיועד להיות רק כאזכור מהיר למבצעי החייאה מאומנים. HeartSine ממליצה שכל המשתמשים הפוטנציאליים ב-PAD 350P יעברו הכשרה על ידי ארגון הכשרה כשיר לגבי השימוש בהחייאה מסורתית וב-PAD 350P, טרם הכנסת PAD 350P לשירות. באם הקווים המנחים ישנתו, התוכנה תהיה זמינה לשדרוג ה-PAD 350P Trainer כדי לעמוד בהם. נא לפנות למפיץ המורשה של HeartSine שלך או ל-HeartSine Technologies. ישרות.

האדם לא מגיב?

יש לקרוא לאדם ולנענע אותו בכתף
יש להתקשר לשירותי החירום



התקשר לשירותי חירום
999/911/112 (וכן) שלה
לדפברילטור חיצוני אוטומטי

יש לפתוח את דרכי האוויר, לבדוק האם יש נשימה



צפה, משש, האזן

יש לבצע החייאה עד שיש דפברילטור חיצוני
אוטומטי זמין או הגיע רופא חירום
יש להיעזר באנשים אחרים ולהתחלף במתן
החייאה (CPR)



ביצוע החייאה (CPR). יש למלא
אחר הקווים המנחים האחרונים של
ה-AHA או ה-ERC

אם זמין דפברילטור חיצוני אוטומטי, יש
להפעילו ולמלא אחר ההוראות - הדפברילטור
החיצוני האוטומטי מעריך קצב

לא מומלץ
הלם חשמלי

הלם חשמלי
מומלץ

העבר
הלם חשמלי

המשך בהחייאה
במשך 2 דקות

המשך בהחייאה
במשך 2 דקות



אם זמין, יש להשתמש בדפברילטור
חיצוני אוטומטי

יש להמשיך במתן החייאה עד
ששירותי החירום מגיעים. יש
להתחלף עם אדם שני לאחר
מחזור אחד או שתי דקות

יש להמשיך עד שהמטופל מתחיל להתעורר,
כלומר: זז, פוקח עיניים ונושם בצורה סדירה

הוראות לסילוק

ה-HeartSine PAD 350P Trainer הוא מכשיר לשימוש רב-פעמי. אם בוצעה תחזוקה בהתאם להוראות במדריך זה, נתונה תקופת אחריות של שנתיים ממועד הייצור. שנת ייצור המכשיר מותווית על ידי שתי הספרות הראשונות של המספר הסידורי.

אם ברצונך להשליך את יחידת ה-HeartSine PAD 350P Trainer, יש להשליך אותה במתקן מיחזור הולם, בהתאם לדרישות הלאומיות, המדינתיות והמקומיות. לחילופין, יש להחזיר את היחידה למפיץ המקומי שלך או ל-HeartSine Technologies לצורך סילוק.

היפטרות בתחומי האיחוד האירופאי:

אין להשליך את יחידת ה-PAD 350P Trainer בתור אשפה עירונית רגילה: יש להפריד את ה-PAD 350P Trainer, לעבור שימוש חוזר או מיחזור בהתאם להנחיה 2002/96/EEC של הפרלמנט האירופאי ומועצת האיחוד האירופאי לגבי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE), או להחזיר למפיץ המקומי שלך או ל-HeartSine Technologies להשלכה.

מגבלות האחריות

HeartSine Technologies או המפיצים המורשים אינם מחוייבים לספק שירות/תיקונים תחת האחריות אם:

- א. בוצעו במכשיר שינויים לא מורשים.
- ב. נעשה שימוש במרכיבים לא-סטנדרטיים.
- ג. המשתמש לא השתמש במכשיר בהתאם להתוויות לשימוש, או להוראות שניתנו במדריך זה.
- ד. המספר הסידורי של המכשיר הוסר, הושחת, נעשה בו שימוש לא הולם או שונה.
- ה. המכשיר, האלקטרודות או הסוללות אוחסנו או נעשה בהם שימוש מחוץ למפרט הסביבתי.
- ו. המכשיר נבדק באמצעות שיטות לא-מאושרות או ציוד לא הולם (ראה את סעיף התחזוקה במדריך זה).

כל טענות או דרישות שנעשות במסגרת האחריות להיות מוגשות ישירות למפיץ שלך שהמכשיר נרכש ממנו במקור. טרם מתן שירות במסגרת האחריות, HeartSine Technologies דורשת הוכחת קניה. יש לעשות שימוש במוצר בהתאם למדריך למשתמש ולמטרה שלשמה הוא מיועד. אם יש לך שאלה כלשהי, נא לפנות אל support@heartsine.com לקבלת עזרה.



HeartSine®

משרדים עולמיים:

HeartSine Technologies Inc
Friends Lane 121
Suite 400
Newtown, PA 18940
טל': 1.215.860.8100
פקס: 1.215.860.8192

מיוצר על-ידי:

HeartSine Technologies Ltd
Canberra House
Airport Road West 203
Belfast BT3 9ED
צפון אירלנד
טל': +44 (0)28 9093 9400



www.heartsine.com
www.heartsine.eu
support@heartsine.com

מפיץ מורשה