



HeartSine®

Lifesaving technology designed for the real world

Referentie technische opmerking:

Werking & opslag van de HeartSine samaritan® PAD & Pad/Ped Paks op de juiste temperatuur

Geachte gewaardeerde klant,

Wij willen graag het belang van de opslag en werking van uw HeartSine samaritan® PAD en de bijbehorende Pad/Ped Paks op de juiste temperatuur zoals hieronder is beschreven, benadrukken. Deze informatie kan in de van toepassing zijnde gebruikershandleidingen worden gevonden.

Voor HeartSine samaritan® PAD apparaten met serienummers beginnend met 04, 05, 06, 07:

Standby temperatuur:

De samaritan® PAD moet worden opgeslagen op een temperatuur tussen de 10 en 50°C. HeartSine beveelt aan dat, indien mogelijk, het apparaat op een comfortabele kamertemperatuur wordt opgeslagen, want dit zorgt ervoor dat zowel de samaritan® PAD als de Pad-Pak de beste prestaties leveren..

Bedrijfstemperatuur:

Als de samaritan® PAD in overeenstemming met de standby omstandigheden (hierboven) voor een periode van tenminste 24 uur wordt bewaard, dan mag hij worden gebruikt in situaties waar de omgevingstemperatuur tussen de 0 en 50°C is.

In dit geval kan het apparaat tot 1 uur nadat het is blootgesteld aan de lagere temperatuur veilig in het lagere temperatuurbereik worden gebruikt.

Transporttemperatuur:

De samaritan® PAD kan tot 2 dagen tijdelijk worden opgeslagen binnen een temperatuurbereik van -10 t/m 50°C. Als u denkt dat de samaritan® PAD beneden de 10°C was opgeslagen, dan dient hij voor een periode van tenminste 24 uur te worden teruggebracht naar een omgevingstemperatuur tussen de 10 en 50°C voordat het apparaat klaar voor gebruik is.

Opslag op lange termijn buiten het temperatuurbereik van 10 t/m 50°C kan de werking van het apparaat nadelig beïnvloeden.

Opmerking: Wanneer een plaats voor de samaritan® PAD wordt gezocht, vermijd dan gebieden die het apparaat blootstellen aan buitengewone vocht, stof of temperaturen.

Hieronder volgt informatie over de HeartSine samaritan® PAD apparaten met serienummers beginnend met 04, 05, 06 en 07.

Als tijdens de werking de samaritan® PAD de verbale opdracht "Waarschuwing batterij bijna leeg" laat horen en men denkt dat het apparaat in een koude omgeving was opgeslagen (beneden 10°C), dan kan het toch nog goed werken afhankelijk van de aanbevelingen voor de opslag- en bedrijfstemperatuur hieronder.

Opmerking: Als de verbale opdracht "Waarschuwing batterij bijna leeg" gehoord wordt, dan zal de groene statusindicator stoppen met knipperen.

Als de samaritan® PAD teruggebracht wordt naar het aanbevolen opslagtemperatuurbereik (10 t/m 50°C), dan dient het groene led als het apparaat de volgende keer ofwel met de hand of via de automatische zelftest aangezet wordt, door te gaan met knipperen, hetgeen aangeeft dat de zelftest met succes was voltooid.

De waarschuwing houdt geen verband met een lage temperatuur als de statusindicator niet groen gaat knipperen of de verbale opdracht "Waarschuwing batterij bijna leeg" doorgaat. Neem in dit geval contact op met uw geautoriseerde HeartSine leverancier of direct met de Technische afdeling van HeartSine Technologies.

Als de samaritan® PAD wordt gebruikt tijdens een noodgeval en "Waarschuwing batterij bijna leeg" wordt gehoord, ga dan door met het reanimeren en de defibrillatietherapie met gebruik van het apparaat.

De samaritan® PAD is in staat om typisch tot tien defibrillatieschokken toe te dienen als de verbale opdracht "Waarschuwing batterij bijna leeg" wordt gehoord.

Opmerking: Terwijl de samaritan® PAD door blijft werken zal hij veilige en van toepassing zijnde therapie leveren.

Als u een reserve Pad-Pak™ heeft (batterij en elektroden) zorg dan dat de Pad-Pak™ batterij wordt vervangen. Zorg in koude omstandigheden dat een reserve Pad-Pak™ in overeenstemming met de bovenstaande aanbevelingen wordt bewaard.



HeartSine®

Lifesaving technology designed for the real world

Voor HeartSine samaritan® PAD apparaten met serienummers beginnend met 08A & 09A:

Standby temperatuur:

De samaritan® PAD moet worden opgeslagen op een temperatuur tussen de 0 en 50°C.

HeartSine beveelt aan dat, indien mogelijk, het apparaat op een comfortabele kamertemperatuur wordt opgeslagen, want dit zorgt ervoor dat zowel de samaritan® PAD als de Pad-Pak™ de beste prestaties leveren.

Bedrijfstemperatuur:

Als de samaritan® PAD in overeenstemming met de Standby omstandigheden (hierboven) voor een periode van tenminste 24 uur wordt bewaard, dan mag hij worden gebruikt in situaties waar de omgevingstemperatuur tussen de 0 en 50°C is.

In dit geval kan het apparaat tot 1 uur nadat het is blootgesteld aan de lagere temperatuur veilig in de lagere temperatuur worden gebruikt.

Transporttemperatuur:

De samaritan® PAD kan tot 2 dagen tijdelijk worden opgeslagen binnen een temperatuurbereik van -10 t/m 50°C.

Als u denkt dat de samaritan® PAD beneden de 0°C was opgeslagen, dan dient hij voor een periode van tenminste 24 uur te worden teruggebracht naar een omgevingstemperatuur tussen de 0 en 50°C voordat het apparaat klaar voor gebruik is.

Opslag op lange termijn buiten het temperatuurbereik van 0 t/m 50°C kan de werking van het apparaat nadelig beïnvloeden.

Opmerking: Wanneer een plaats voor de samaritan® PAD wordt gezocht, vermijd dan gebieden die het apparaat blootstellen aan buitengewone vocht, stof of temperaturen.

Hieronder volgt informatie over de HeartSine samaritan® PAD apparaten met serienummers beginnend met 08A of 09A.

Als tijdens de werking de samaritan® PAD de verbale opdracht "Waarschuwing batterij bijna leeg" laat horen en men denkt dat het apparaat in een koude omgeving was opgeslagen (beneden 0°C), dan kan het toch nog veilig en goed werken afhankelijk van de aanbevelingen voor de opslag- en bedrijfstemperatuur hieronder.

Opmerking: Als de verbale opdracht "Waarschuwing batterij bijna leeg" gehoord wordt, dan zal de statusindicator rood gaan knipperen.

Als de samaritan® PAD teruggebracht wordt naar het aanbevolen opslagtemperatuurbereik (0 t/m 50°C), dan dient het knipperende rode led als het apparaat de volgende keer ofwel met de hand of via de automatische zelftest aangezet wordt, veranderd te zijn naar groen, hetgeen aangeeft dat de zelftest met succes was voltooid.

De waarschuwing houdt geen verband met een lage temperatuur als de statusindicator rood blijft knipperen of de verbale opdracht "Waarschuwing batterij bijna leeg" doorgaat. Neem in dit geval contact op met uw geautoriseerde HeartSine leverancier of direct met de Technische afdeling van HeartSine Technologies.

Als de samaritan® PAD wordt gebruikt tijdens een noodgeval en "Waarschuwing batterij bijna leeg" wordt gehoord, ga dan door met het reanimeren en de defibrillatietherapie met gebruik van het apparaat.

De samaritan® PAD is in staat om typisch tot tien defibrillatieschokken toe te dienen als de verbale opdracht "Waarschuwing batterij bijna leeg" wordt gehoord.

Opmerking: Terwijl de samaritan® PAD door blijft werken zal hij veilige en van toepassing zijnde therapie leveren.

Als u een reserve Pad-Pak™ heeft (batterij en elektroden) zorg dan dat de Pad-Pak™ batterij wordt vervangen.

Zorg in koude omstandigheden dat een reserve Pad-Pak™ in overeenstemming met de bovenstaande aanbevelingen wordt bewaard tot hij nodig is.

Dutch H009-013-010-0