

Categorías IP Tabla de protección contra polvo y agua¹

Protección contra objetos sólidos		Protección contra líquidos	
Primer dígito	Definición	Segundo dígito	Definición
0	Sin protección	0	Sin protección
1	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm de tamaño (por ejemplo, las manos)	1	Protección contra la caída vertical de gotas de agua
2	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm de tamaño (por ejemplo, los dedos)	2	Protección contra salpicaduras directas de agua con un ángulo de inclinación de hasta 15° a cada lado
3	Protección contra objetos sólidos de más de 2,5 mm de tamaño (por ejemplo, herramientas y cables)	3	Protección contra salpicaduras de agua con un ángulo de inclinación de 60° a cada lado
4	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm de tamaño (por ejemplo, herramientas pequeñas y cables de diámetro pequeño)	4	Protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección
5	Protección contra una entrada limitada de polvo que no penetrará en una cantidad que interfiera con el adecuado funcionamiento del dispositivo	5	Protección contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección
6	Protección contra cualquier entrada de polvo	6	Protección contra chorros de agua potentes desde cualquier dirección
		7	Protección contra los efectos de la inmersión temporal en agua con unas condiciones y una presión estandarizadas
		8	Protección contra largos períodos de inmersión en agua, en una situación más grave que la correspondiente al dígito 7
		9	Protección contra chorros de agua proyectados a una presión y una temperatura elevadas desde cualquier dirección



HeartSine samaritan PAD

Categoría IP56: la más alta entre los principales DEA en cuanto a la protección contra la entrada de polvo y agua

References

1 International Standard IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Todas las afirmaciones son válidas a fecha de 06/2020.

Para obtener más información, contacte con su representante de Stryker o visite nuestra página web strykeremergencycare.com

Acceso público a asistencia de urgencias

Los usuarios del DEA deben recibir formación sobre RCP y el uso del DEA.

Si bien no es posible garantizar la reanimación de todas las personas, los estudios demuestran que una desfibrilación precoz puede mejorar drásticamente las tasas de supervivencia. Los DEA están destinados a su uso con pacientes adultos y pediátricos. Los DEA pueden usarse con pacientes pediátricos de menos de 25 kg de peso, pero algunos modelos requieren electrodos de desfibrilación por separado.

La información presente tiene como fin mostrar la gama de productos de Stryker. Consulte las instrucciones de uso para obtener instrucciones completas para indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles acontecimientos adversos antes de utilizar cualquier producto de Stryker. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los mercados, puesto que la disponibilidad de los mismos depende de la práctica clínica o reglamentaria de cada mercado. Contacte con su representante si tiene alguna pregunta sobre la disponibilidad de los productos de Stryker en su zona. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Los productos descritos cuentan con el marcado CE según los reglamentos y directivas de la UE.

Stryker o entidades empresariales asociadas poseen, hacen uso o han solicitado las siguientes marcas comerciales o de servicio: HeartSine, samaritan, Stryker. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

La falta de un producto, función, nombre de servicio o logotipo de esta lista no constituye la renuncia de la marca registrada de Stryker ni otros derechos de propiedad intelectual en relación al nombre o logotipo.

06/2020

HeartSine SAM 500P no se comercializa en EE. UU.

Fabricado en el Reino Unido.

H009-020-043-1 ES

Copyright © 2020 HeartSine Technologies. Todos los derechos reservados.



HeartSine Technologies Ltd.
203 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Fax +44 28 9093 9401
heartsinesupport@stryker.com
heartsine.com

Stryker European Operations
B.V. Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

Distribuido por:

C/ Sepúlveda, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel +34 91 728 35 00
Fax +34 91 358 07 48